

# Composite | Q-Finierer



Q-Finierer – für rationelles Arbeiten und optimale Finierergebnisse bei der Composite-Bearbeitung.


Die Bearbeitung von Composite-Füllungen erforderte bislang 3 Finierstufen (normaler, feiner und extrafeiner Finierer).

Durch die Entwicklung einer neuartigen Verzahnung ist erstmals eine Reduzierung auf 2 Finierstufen gelungen:

- Stufe ①** Q-Finierer
- Stufe ②** ultrafeiner Finierer

**Vorteile:**

- Zeitersparnis durch Wegfall eines Arbeitsganges.
- Kostenersparnis durch Einsparung eines Instrumentes.
- Bereits nach der 1. Finierstufe wird durch die füllungsgerechte Spezialquerhiebverzahnung eine bessere Oberflächenqualität erreicht als vorher nach der 2. Stufe
- Die glatte, nicht verzahnte Spitze bei den konischen Figuren H134Q und H135Q sorgt für schonendes Finieren und schützt die Gingiva.

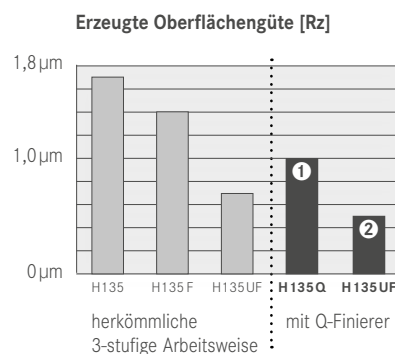

**Anwendungsbeispiel:**

1. H134Q.314.014, approximal
2. H135Q.314.014, labial
3. H379Q.314.023, palatinal



**Anwendungshinweise:**

- Optimale Ergebnisse werden unter Verwendung von Spraykühlung (mind. 50 ml/min) bei  $\omega_{opt}$  20.000 min<sup>-1</sup> erzielt.
- Für das perfekte Finish empfehlen wir unser umfangreiches Composite-Polierer-Programm.

**labial**

- H134Q.314.014
- H135Q.314.014
- H48LQ.314.012
- H48XLQ.314.012 **neu**
- H375RQ.314.016

**palatinal**

- H379Q.314.018
- H379Q.314.023

**okklusal**  
mit schneidender Spitze


- H246Q.314.009
- H390Q.314.018

**interdental**

- H50AQ.314.010

**Tipp:**


Für die folgende Politur empfehlen wir unser zweistufiges Poliersystem für Composite:

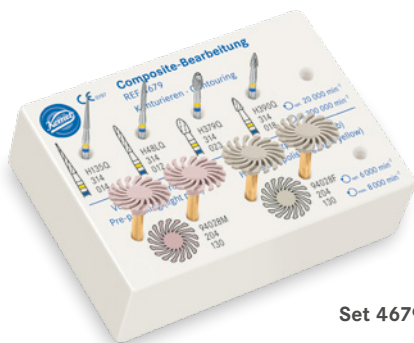

**Set 4679**  
Q-Finier und  
Polierspiralen



**Set 4669**  
Polierspiralen-Startset

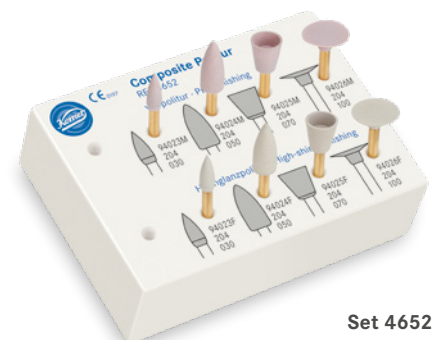

**Set 4652**  
Composite-Polierer in den  
bekanntesten Formen

