



Nowy poziom  
elastyczności  
**F6** SkyTaper.

---



---

Brasseler®, Komet®, Art2®, CeraBur®, CeraCut®,  
CeraDrill®, CeraFusion®, CeraPost®, DC1®, DCTherm®,  
Determinator®, FastFile®, F360®, F6 SkyTaper®, H4MC®,  
OccuShaper®, OptiPost®, PolyBur®, PrepMarker®,  
Procodile®, R6 ReziFlow®, TissueMaster®, TMC®,  
TissueMaster Concept® i Visio-Soft® to zastrzeżone  
znaki towarowe Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG.

Wymienione w tekście produkty i użyte nazwy są  
częściowo chronione prawem marki, prawem  
patentowym i prawem autorskim. Brak specjalnego  
oznaczenia lub znaku © nie oznacza braku ochrony  
prawnej.


Materiał ten jest chroniony prawem autorskim.  
Wszelkie prawa zastrzeżone, również w odniesieniu do  
tłumaczenia, przedruku i powielania, w tym  
częściowego. Bez uzyskania pisemnej zgody wydawcy  
żadna część niniejszego materiału nie może być w  
jakiegokolwiek formie (fotokopia, mikrofilm lub innym  
sposobem) reprodukowana lub przetwarzana za pomocą  
systemów elektronicznych.

Zastrzega się możliwość zmiany produktu i koloru oraz  
wystąpienia błędów drukarskich.

Stan z sierpień 2019 r.

# Większy stożek, większe spektrum.

- Poszerzenie obrotowe pilnikiem o zbieżności.06
- Spektrum pilników w pięciu wielkościach przeznaczonych do wszystkich kanałów
- Elastyczność i skuteczność dzięki inteligentnemu kształtowi pilników
- Sterylnie zapakowane pilniki jednorazowe

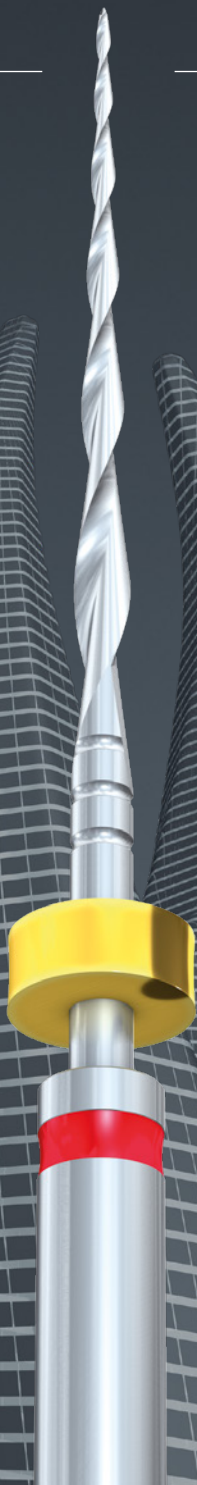


# Bezkompromisowa elastyczność.

## Elastyczność systemowa i w stosowaniu

- Kompletny system: Pilniki NiTi w pięciu różnych wielkościach i trzech długościach do każdego rodzaju kanału.
- Swobodny wybór metody obturacji dzięki zbieżności .06
- Stosowanie we wszystkich obrotowych kątnicach i prostnicach z ograniczonym momentem obrotowym

## Skuteczny i elastyczny kształt pilnika

- jeden pilnik dla większości kanałów korzeniowych
- przekrój w kształcie podwójnej litery S zapewnia wysoką wydajność oczyszczania
- doskonałe zachowanie kształtu kanału

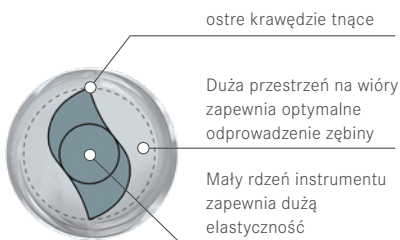


przekrój pilnika


[ 01 ] Wstępne poszerzenie obszaru ujścia kanałów np. Otwieraczem OP10L19.

[ 02 ] Preparacja ścieżki toru wejścia np. Pilnikiem K wielkości 015.

Wybór odpowiedniego pilnika F6 SkyTaper w zależności od wybranego wcześniej pilnika (ręcznego)  
Zasada: pominąć jedną wielkość ISO.

[ 03 ] Poszerzanie kanału pilnikiem F6 SkyTaper.

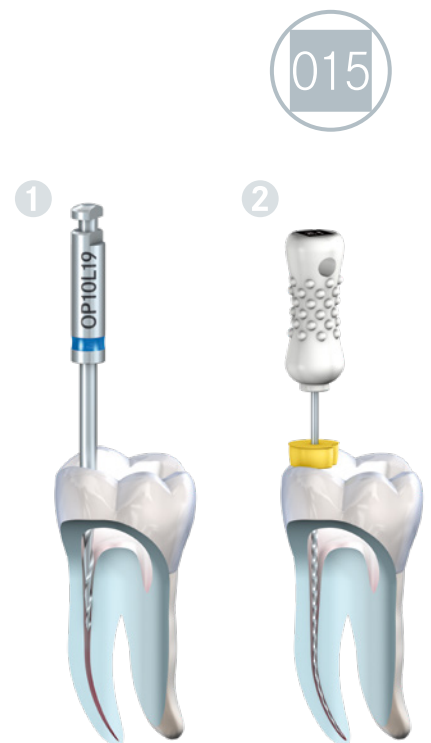

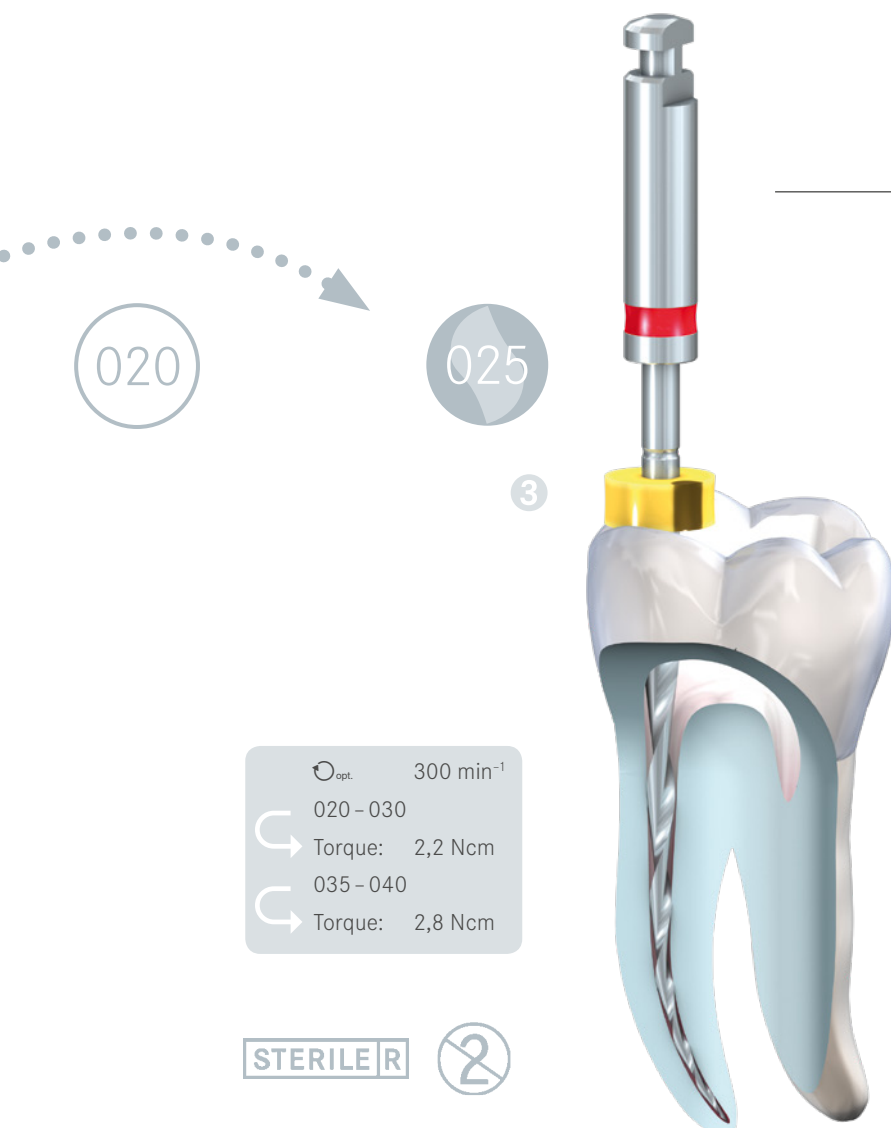

### dr Günther Stöckl

specjalista endodoncji  
w Rottenburg an der Laaber

„F6 SkyTaper to system zarówno dla lekarza stomatologii ogólnej jak i też specjalisty. Bardzo dobre ostrza tego instrumentu skracają czas poszerzania kanału, co pozwala mi poświęcić więcej czasu dezynfekcji chemicznej.

Sz szczególnie podoba mi się zbieżność wielkości 6%:

Pozwala ona na optymalne przygotowanie kanału do późniejszej obturacji zarówno na zimno jak i też na ciepło. Tego systemu nie może zabraknąć w mojej koncepcji poszerzania kanałów korzeniowych!“



# F6 SkyTaper. Perfekcja i wszystko co z tym związane



Tor wejścia do #010



F06L21/L25/L31.204.020

Tor wejścia do #015



F06L21/L25/L31.204.025

Tor wejścia do #020



F06L21/L25/L31.204.030




+ Opcja dla szerokich kanałów



F06L21/L25/L31.204.035



F06L21/L25/L31.204.040

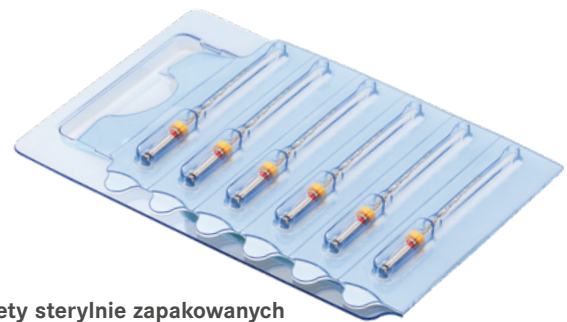

## Zalety sterylnie zapakowanych instrumentów jednorazowych

- Zmniejszone ryzyko złamania spowodowane zmęczeniem cyklicznym
- Wykluczone ryzyko zanieczyszczeń krzyżowych
- Wyeliminowanie nakładu pracy związanej z czyszczeniem, dezynfekcją, sterylizacją i dokumentacją częstotliwości stosowania



9938 E-Drive  
Kątnica endodontyczna

### Aksesoria do poszerzania:




● **OP10L19.204.030**  
Otwieracz



○ **PG03L21/L25/L31.204.015**  
PathGlider



● **PG03L21/L25/L31.204.020**  
PathGlider

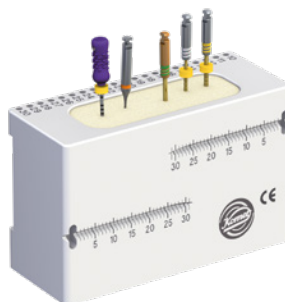

**595** Stojak tymczasowy

### Aksesoria do obturacji:



**9994** F360 Fill podgrzewacz



**9996** F360 Fill obturatory



**9995** F360 Fill weryfikatory



**PPF06** F6 SkyTaper sączi papierowe

**GPF06** F6 SkyTaper świece gutaperkowe



**9978** EasySeal  
Materiał wypełnieniowy na bazie żywicy epoksydowej

Komet Dental

Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG

Trophagener Weg 25 · 32657 Lemgo

Postfach 160 · 32631 Lemgo · Germany

Sprzedaż Niemcy:

Telefon +49 (0) 5261 701-700

Telefax +49 (0) 5261 701-289

info@kometdental.de

www.kometdental.de

Eksport:

Telefon +49 (0) 5261 701-0

Telefax +49 (0) 5261 701-329

export@kometdental.de

www.kometdental.de

Komet Austria Handelsagentur GmbH

Hellbrunner Straße 15

5020 Salzburg · Austria

Telefon +43 (0) 662 829-434

Telefax +43 (0) 662 829-435

info@kometdental.at

www.kometdental.at