


# SonicLine

Scaler/Perio | SF1-8

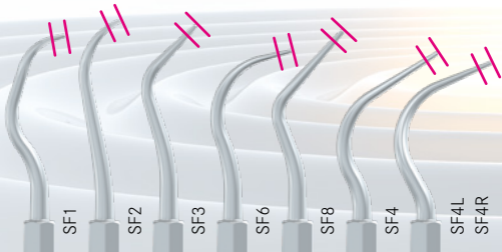

— max. 2 mm



**Indikation/Indication****Power Level SF1LM/S**

	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Scaler	1	2	3
Implantatprophylaxe/Implant prophylaxis	1	2	●
Paro/Perio*	1	2	3
Kronenpräp./Crown Prep, Stripping/Shaping	1	●	●
Bearbeitung von Approximalflächen/ Work on interprox. surfaces (SFM/D6, SFM/D7)	1	●	3
Veneertechnik/Veneer Technique, Micro/Bevel	1	●	●
Fissurenbearbeitung/Opening of Fissures	1	2	3
Endo*	1	2	●
Chirurgie*/Surgery*	1	2	●

\*Achtung: Bei vereinzelt Instrumenten dieser Indikation gibt es Einschränkungen der Leistungsstufen. Bitte die korrekte Leistungsstufe der Gebrauchsanweisung entnehmen.

\*Caution: In some cases, the instruments intended for this indication cannot be used at all power settings. Please refer to the instructions for use for the correct setting.

● erlaubt/permittted

● nur kurzfristig erlaubt/permittted for a short time only

● nicht erlaubt/not permittted