



固美

Endo ReStart. 开启再治疗领域新时代





Brasseler®, Komet®, Art2®, CeraBur®, CeraCut®,
CeraDrill®, CeraFusion®, CeraPost®, DC1®, DCTherm®,
Derminator®, FastFile®, F360®, F6 SkyTaper®, H4MC®,
OccluShaper®, OptiPost®, PolyBur®, PrepMarker®,
Procodile®, R6 ReziFlow®, TissueMaster®, TMC®,
TissueMaster Concept® 以及 Visio-Soft® 属于
Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG 的名称和商标。

文中所示的部分产品和名称拥有商标、专利及版权。
文中未标识 © 特殊标识的部分，仍受法律保护。

本出版物为本公司版权所有。本公司保留所有版权权利，包括翻译、复印和复制（全部或部分）。未经编者书面许可，不得以任何形式、任何方式，以电子媒介形式复制或加（复印、微缩胶卷或其他方法）本出版物的任何部分。

产品颜色和产品本身可能会有修改，
可能出现印刷错误。

2019年11月编制

Endo ReStart 预示着根管再治疗 新时代的来临

- 镍钛合金材质的再治疗锉新系统
- 特别调整的刀片几何形状和动态扭转的功能，达到去除根管充填材料的最佳效果。
- 安全且高效的工作尖设计提供了一种可控的治疗方法
- 锥度.05在稳定性和灵活性之间达到了完美的平衡



Endo ReStart再治疗锉 使用动态扭转进行再治疗




完美的平衡.

每次再治疗均是对以往失败的根管治疗的纠正。Endo ReStart再治疗锉设定了恒定的锥度.05, 在出色的稳定性和高度的灵活性之间达到一种完美的平衡。因此, 它可适应各种不同的根管解剖结构。



高效的工作尖

锥形Endo ReStart再治疗锉采取了安全且高效的工作尖设计使上述经过优化的根管锉轻松地穿透充填材料。Endo ReStart开口锉的尖部毫不费力即可进入根管充填材料。接着, Endo ReStart根管锉在根管内以有效且完全受控的方式工作。完美契合以下理念: 一切即在掌握。

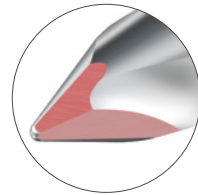


短暂又柔和

Endo ReStart根管锉系列的长度有21 mm和25 mm可供选择。Endo ReStart开口锉具备强力快速的切割能力, 即使是非常坚硬的根管充填材料, 它也是初级预备的理想选择。正是如此, 只需使用1到2种器械, 即可清除大多数旧充填物。




动态扭转

配备经特别调整的刀片几何形状, 从磨削到清楚全方位的清楚根管中的充填物, 同其他系统相比较该系列的根管锉的效率都是首屈一指。在器械工作尖设有许多旋转切刃, 可将根管锉有效地拧入根管充填物中。排屑槽之间的距离随工作部分而增加, 从而可在完美的控制下达到去除充填物的最佳效果。这就是我们所说的“动态扭转”。

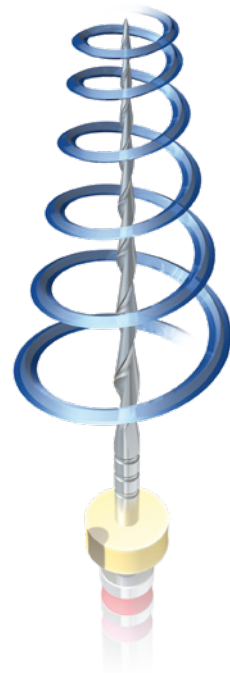

分解步骤

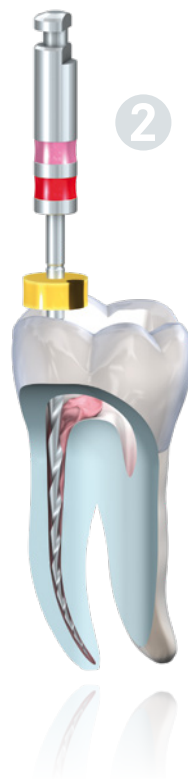

[01] 使用Endo ReStart开口锉
去除根冠三分之一处的根
充填物。

[02] 使用Endo ReStart根管锉去除剩
余的根管充填物。

[03] 根管系统的最终预备
可使用我们的F6 SkyTaper进行预
备



☞_{opt.} 300 转/每分钟
扭矩： 1,8 Ncm




Endo ReStart: 一种最迅捷的安全 再处理方法

Endo ReStart系统概要



●○ RE10L15.204.030 030/.10
Endo ReStart 开口锉
长度: 15 mm

STERILE

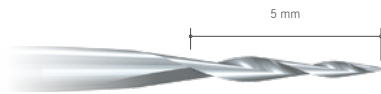


●○ RE05L21.204.025 025/.05
Endo ReStart 根管锉
长度: 21 mm

STERILE



●○ RE05L25.204.025 025/.05
Endo ReStart 根管锉
长度: 25 mm

STERILE

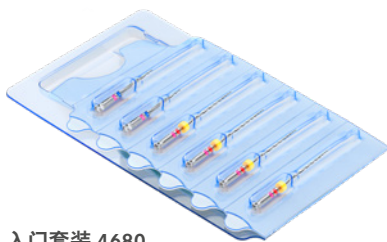

入门套装 4680

2套Endo ReStart开口锉和4套
Endo ReStart
长度: 25 mm



Giuseppe Squeo博士

意大利根管治疗专家和Endo ReStart根管锉思路提供者

“我大部分时间都花在实施根管治疗上, 其中至少包括50%的根管再治疗。”

为方便这部分的根管治疗, 我一直在寻找一种能直接去除根管中大部分充填材料的器械。

感谢Endo ReStart再治疗锉, 我终于不用再继续搜索了。它“安全有效”的工作尖设计在本领域中独占鳌头。它甚至可轻松穿透非常坚硬紧实的根充材料。另外, 这种根管锉非常灵活, 可去除弯曲根管中的旧充填物, 并不会有任何问题。Endo ReStart再治疗锉已成为我日常使用的器械中不可或缺的一部分”。

Komet Dental
Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG
Trophagener Weg 25 · 32657 Lemgo
Postfach 160 · 32631 Lemgo · Germany

Export:
Telefon +49 (0) 5261 701-0
Telefax +49 (0) 5261 701-329
export@kometdental.de
www.kometdental.de

