




固美

F360.
简单、安全

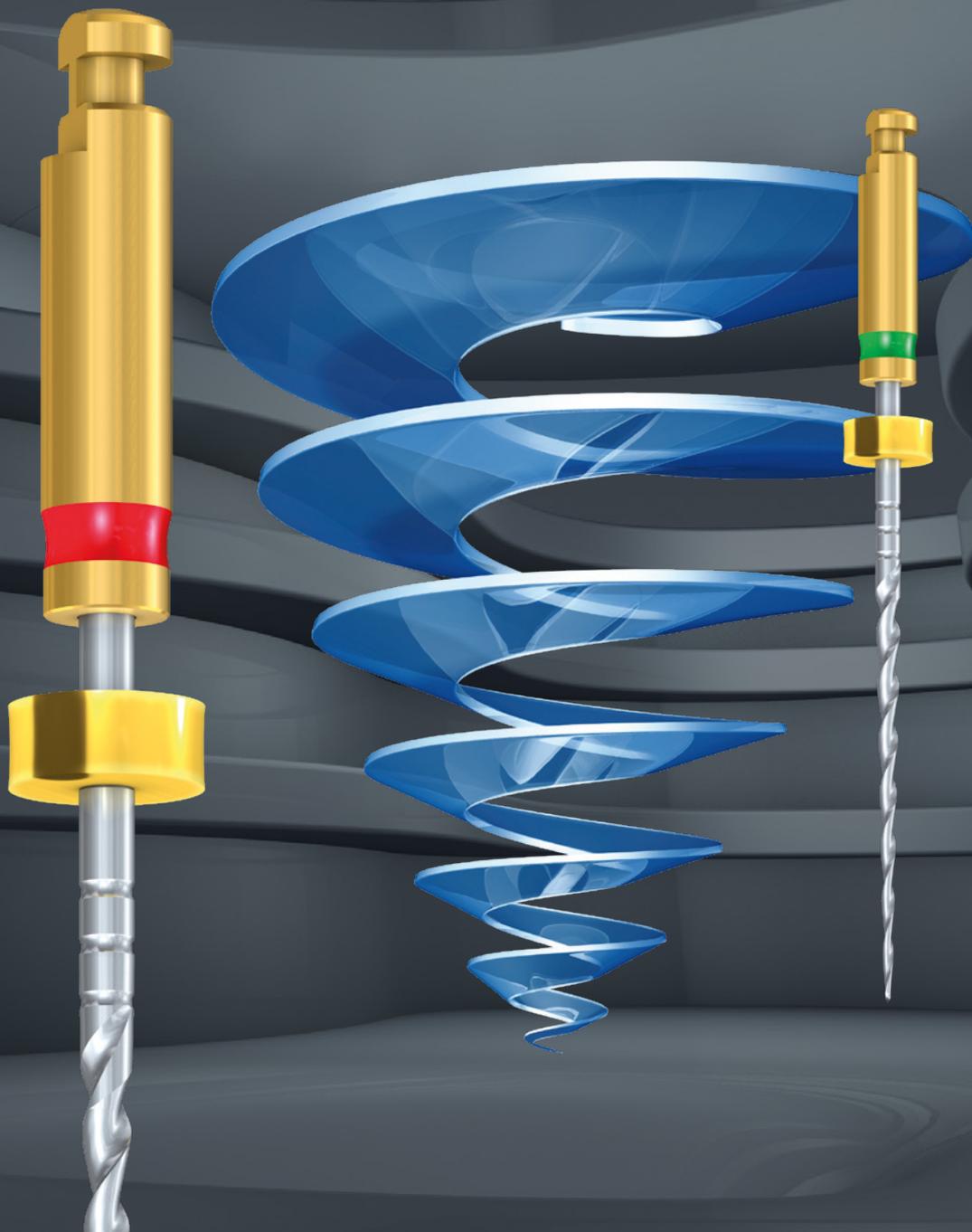



Brasseler®, Komet®, Art2®, CeraBur®, CeraCut®, CeraDrill®, CeraFusion®, CeraPost®, DC1®, DCTherm®, Derminator®, FastFile®, F360®, F6 SkyTaper®, H4MC®, OccluShaper®, OptiPost®, PolyBur®, PrepMarker®, Procodile®, R6 ReziFlow®, TissueMaster®, TMC®, TissueMaster Concept® 以及 Visio-Soft® 属于 Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG 的名称和商标。

文中所示的部分产品和名称拥有商标、专利及版权。
文中未标识 © 特殊标识的部分，仍受法律保护。

本出版物为本公司版权所有。本公司保留所有版权权利，包括翻译、复印和复制（全部或部分）。未经编者书面许可，不得以任何形式、任何方式，以电子媒介形式复制或加（复印、微缩胶卷或其他方法）本出版物的任何部分。

产品颜色和产品本身可能会有修改，
可能出现印刷错误。

F360 让您对根管治疗情有独钟

第一次使用就让您爱不释手：
Komet(固美)独创的双根管锉系列器械
F360使根管预备工作十分轻松、简
单，而且非常安全。无论遇到任何挑
战，F360都是机械预备根管新手的
理想选择。即使迄今仍不喜欢根管治
疗的人，也会爱上F360。





简便易用

“我以前总是担心某天会出问题。每次在根管治疗的保守手术结束后，我都心情低落。F360系列改变了这一切。现在，我信心满满。我只需放松享受根管预备过程和期待安全结果即可！”



Maximilian Weiland博士

德国Pfaffenhofen的普通牙医

优点：

- 使用F360系列器械快速实现根管预备。根管锉非常高效，通常每个根管不要3分钟即可预备完成。
- F360系统非常实用。大多数情况下，只要使用2支根管锉，更换根管锉时，也不需要再调整扭矩。
- 该系统适用于几乎任何根管。F360在根管治疗中是真正的多面手。


研究记录！

- 快速预备
- 保留根管的原始解剖结构
- 几乎不存在对碎屑的过度推挤

参考资料：

1. 使用各种单支锉系统预备根管及碎屑推出根尖孔定量评估：Reciproc、F360、与OneShape Mtwo
作者：S. Bürklein, S. Benten, E. Schäfer
出版：2014年版国际根管治疗杂志；47, 405 - 409。
2. 在建立和未建立光滑通道的模拟S形根管中不同镍钛锉系统的成形能力
作者：S. Bürklein, T. Poschmann, E. Schäfer
出版：2014年根管治疗杂志；40, 1231 - 1234。
3. 模拟S形根管中4种不同单支管锉系统的成形能力
作者：A. Saleh, P. Gilani, S. Tavanafar, E. Schäfer
出版：2015年根管治疗杂志；41, 548-552。



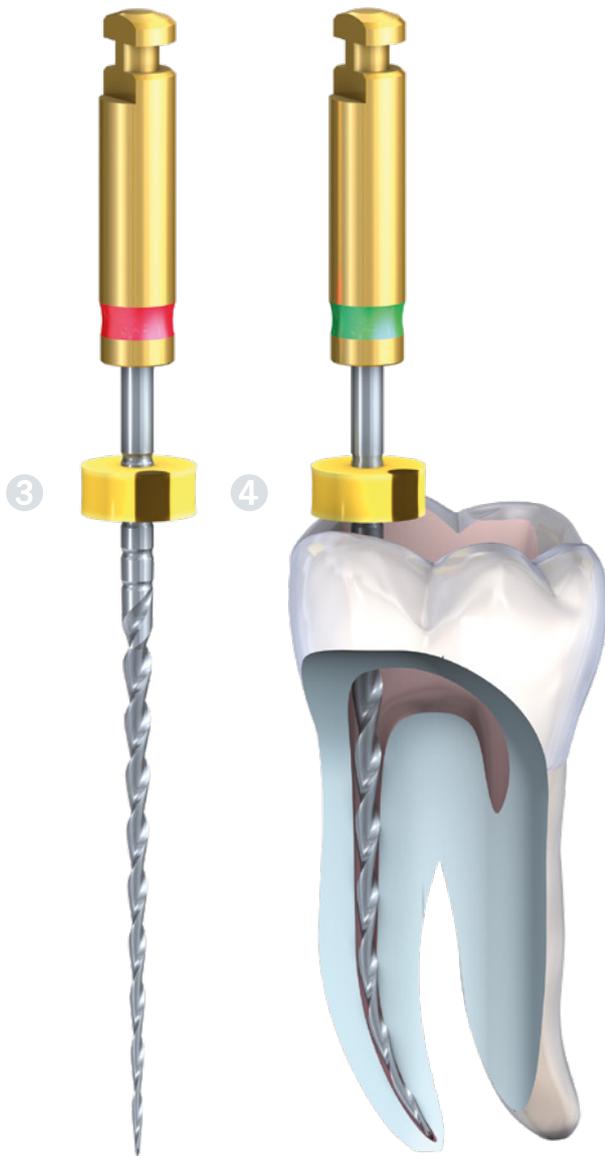

[01] 可选择使用开口锉OP10L19充分准备根管开口。

[02] 可选择合适的手用锉或PathGlider通道锉建立光滑通道。

[03] 使用尺寸为025的F360进行短时间的上下提拉运动预备整个工作长度的根管。

[04] 使用尺寸为035的F360预备根管。



STERILE | R





Opt. 250 - 350 转/每分钟
扭矩：1,8 Ncm



每个细节都经过深思熟虑

F360详细介绍

- 仅需选用2支锉预备根管。
- 无需调整扭矩。
所有根管锉使用相同的设置 (1.8 Ncm)。
- 可选用传统、扭力较小的根管马达采用传统旋转方式 (360°) 使用。
- 由于根管锉的锥度小(.04), 该系列器械适用于几乎所有根管解剖结构, 无论是直的、弯的还是S形的解剖结构
- 由于镍钛合金的材质和格外精密的双S形横截面, 具备出色的切削性能和抗折断性能。
- F360-多面手: 用于每种根管的根管锉。
F360系统可提供3种长度和4种尺寸。

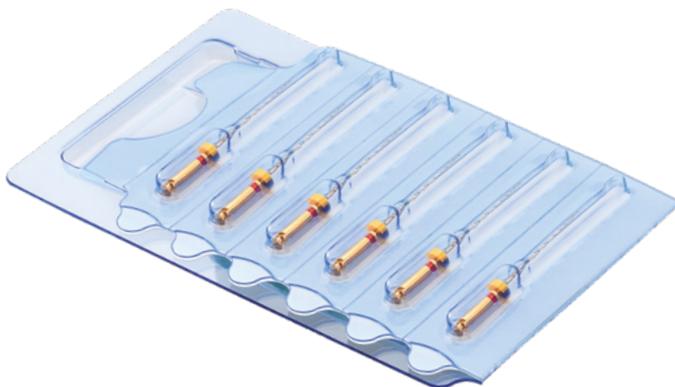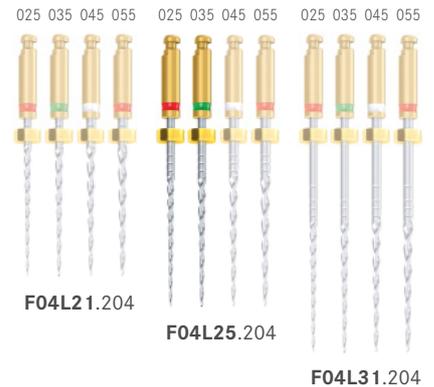

无菌包装的一次性器械的优点：

- 降低因循环疲劳而造成断裂的风险
- 无交叉污染的风险
- 无需再处理(清洗、消毒和灭菌)或记录使用次数

用于预备的配件：




● OP10L19.204.030
开口锉



○ PG03L21/L25/L31.204.015
通道锉



● PG03L21/L25/L31.204.020
通道锉

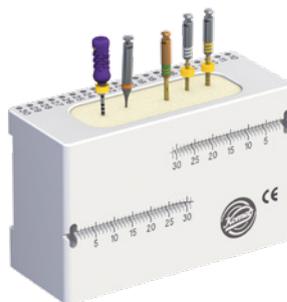

595 测量尺和临存架



9938 E-Drive
根管治疗弯机

用于填充的配件：



PPF04 F360 纸尖

GPF04 F360 牙龈尖



9978 EasySeal
基于环氧树脂的根管充填材料



9994 F360 充填加热炉



9996 F360 充填器



9995 F360 充填检验器

Komet Dental

Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG

Trophagener Weg 25 · 32657 Lemgo

Postfach 160 · 32631 Lemgo · Germany

Export:

Telefon +49 (0) 5261 701-0

Telefax +49 (0) 5261 701-329

export@kometdental.de

www.kometdental.de
