



## 旋转式双根管锉系统

### F360.

#### 迅捷、简单和安全

- 仅用2种根管锉完成根管预备
- 在旋转模式下使用每一种根管锉以充分发挥其工作长度
- 所有根管锉具有相同的设置
- 高效的双S形横截面

在使用F360根管锉前，使用开口锉(如OP10L19)扩张牙髓腔通道并清除所有感染物质。随后，使用合适的手动器械确保根管的开放性。多数情况下，只需要2种根管锉就可预备根管。首先使用尺寸为025的红色F360根管锉，然后使用尺寸为035的绿色F360根管锉。对于极其狭窄的根管，首先使用尺寸为025的F360根管锉。另一方面，如根管较宽，可能需要使用尺寸为045(白色)和055(红色)的其他根管锉。

#### 根管锉尺寸：

##### F360 根管锉-锥度.04



● F04L21/L25/L31.204.025



● F04L21/L25/L31.204.035

#### 较宽根管的选择



○ F04L21/L25/L31.204.045



● F04L21/L25/L31.204.055

## 往复式单根管锉系统

### Procodile.

#### 绿色、敏捷、热切

Procodile根管锉设计经过了彻底修改，是根管预备领域中全新的类型。创新、锥度可变的根管锉芯体以及双S形横截面使Procodile明显更加高效、灵活。因此，Procodile是实现根管完美成形和高质量预备的理想选择。首先Procodile可明显区别于所有其他根管锉鲜明的绿色涂层使其一目了然。

- 得益于一创新的可变锥形锉芯，即使在弯曲的根管中也具有无与伦比的灵活性
- 由于扩大了切屑空间，因此在预备过程中效率更高
- 由于增强了抗循环耐疲劳能力，从而提高了治疗的安全
- 适用于所有常见的左切式根管马达设备，EndoPilot®中具有获专利的ReFlex®运动

#### 根管锉尺寸：

##### Procodile 根管锉-锥度.06



●● PROC6L25.204.020



●● PROC6L25.204.025



●● PROC6L25.204.030

##### Procodile 根管锉-锥度.05



●● PROC5L25.204.035



●● PROC5L25.204.040

##### Procodile 根管锉-锥度.04



○● PROC4L25.204.045



●● PROC4L25.204.050

## 旋转式单根管锉系统

### F6 SkyTaper.

#### 灵活性达到一新水平

F6 SkyTaper是锥度为.06的单根管锉系统，采用镍钛材质，从而提供高度的灵活性，便于根管马达科专家和根管马达用。

- 使用锥度.06的根管锉沿整个工作长度旋转进行根管预备
- 综合全面的根管锉系列：镍钛根管锉包括5种尺寸和3种长度，适用于各种根管解剖结构
- 高效的双S形横截面，便于彻底清洁
- 出色的保护根管的天然解剖形态
- 得益于.06的锥度，便于采用任意方法进行充填
- 可在扭力较小的根扩手机和马达上使用
- 无菌包装的一次性根管锉

#### 根管锉尺寸：

##### F6 SkyTaper 根管锉-锥度.06



● F06L21/L25/L31.204.020



● F06L21/L25/L31.204.025



● F06L21/L25/L31.204.030

#### 较宽根管的选择



● F06L21/L25/L31.204.035



● F06L21/L25/L31.204.040