




圆头根管车针 | H1SML

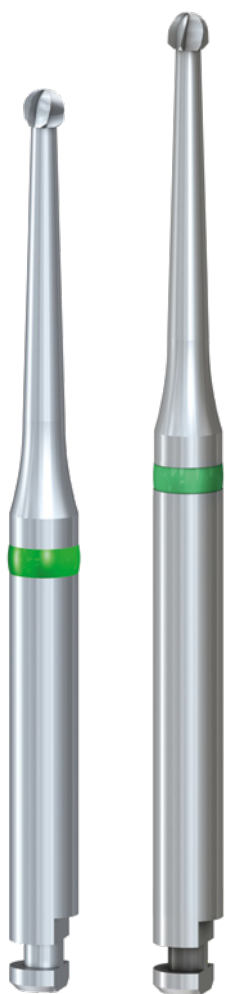

用于根管治疗中预备峡区的高效根管车针。

H1SML是专门用于预备峡区的车针。常规治疗中，不能发现和直接穿透接受根管治疗的多根牙。很多情况下必须在一部分或总长上建立峡区，以便定位隐藏的根管。连接两个单独根管的峡区内，可以含有牙髓组织，或者当组织坏死和细菌感染时，可以存在坏死的牙髓组织。



H1SML具有特别锋利的工作部分和长颈部，确保毫无阻挡地观察到手术部位。使用它可以理想地观察到牙髓部位中牙冠内的深部髓腔。

优势：

- 长颈部
- 极佳视野控制
- 高效安全
- 特别锋利
- 具有便于识别的绿色标识环

应用：

1. 下颌第一磨牙：
使用超长的钨钢车针H1SML，按照髓腔的轮廓，向下预备直到根管的开口处。
2. 初步预备暴露近中两根管的入口。
3. 使用超长钨钢车针H1SML进一步预备，显示第三根管的入口。



建议使用方法：

- 使用时切勿施加压力
- 干燥工作，即无需冷却。
多功能手柄操作时产生的空气可以同时清除碎屑。
- 用于转速为 \odot_{opt} 1.500 – 2.000 rpm 的反角手机或微动力马达。

