


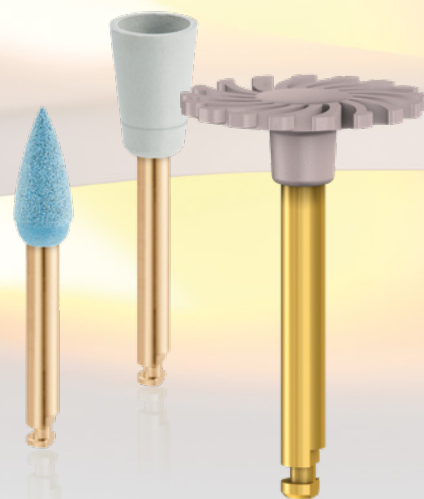


Strumenti di lucidatura Art2.  
Brillantezza straordinaria in solo  
due passaggi.

---





Brasseler®, Komet®, Art2®, CeraBur®, CeraCut®, CeraDrill®, CeraFusion®, CeraPost®, DC1®, DCTherm®, Derminator®, FastFile®, F360®, F6 SkyTaper®, H4MC®, OccluShaper®, OptiPost®, PolyBur®, PrepMarker®, Procodile®, R6 ReziFlow®, TissueMaster®, TMC®, TissueMaster Concept® e Visio-Soft® sono marchi registrati della Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG.

I prodotti e le denominazioni riportati nel presente testo sono in parte protetti dal diritto d'autore, dal diritto dei marchi e dai rispettivi brevetti. La mancata apposizione di particolari indicazioni e/o del marchio ® non esclude la sussistenza di un'eventuale tutela giuridica.

La presente opera è protetta dal diritto d'autore. Tutti i diritti, ivi compresi quelli di traduzione, riproduzione e duplicazione, totali o parziali, sono riservati. Nessuna parte della presente opera può essere riprodotta o diffusa con un qualsivoglia mezzo (fotocopia, microfilm o qualsiasi altro mezzo) nonché rielaborata con l'ausilio di sistemi elettronici senza l'autorizzazione scritta dell'editore.

Con riserva di modifiche attinenti prodotti e colori.  
Non si risponde di eventuali errori di stampa.



# Indice

4   5	Introduzione
6   7	Lucidatura di compositi
8   9	Lucidatura di ceramiche
10	Lucidatura di metalli
11	Disinfezione/Sterilizzazione degli strumenti di lucidatura

# Semplice, perché duplice: la intelligente gamma di strumenti per la lucidatura di tutti i materiali.

---

Una perfetta lucidatura è l'obiettivo di ogni studio odontoiatrico. Per ottenere tutto questo nel modo più rapido, semplice ed efficace possibile, abbiamo inventato la gamma Art2. Un sistema di lucidatura che funziona in quasi tutte le applicazioni con solo due passaggi calibrati l'uno con l'altro.

Ogni componente della gamma Art2 è perfettamente calibrato per le strutture e le textures dei diversi materiali di restauro moderni. Inoltre la fresa a finire e lo strumento di lucidatura lavorano sempre come coppia affiatata che porta a termine il proprio compito in maniera veloce e professionale.

Per potersi orientare immediatamente in qualsiasi caso di lucidatura, il sistema segue una logica precisa: basta uno sguardo per sapere immediatamente quale coppia di strumenti Art2 deve essere utilizzata. Per assicurarsi di rispettare sempre la giusta successione di utilizzo, gli strumenti di lucidatura impregnati di grano di diamante sono contrassegnati con i codici dei pezzi corrispondenti.

C - coarse (grossa) per la lisciatura e la contornatura  
M - medium (media) per la brillantatura  
F - fine (fine) per la conclusiva lucidatura a specchio

Suggerimento: Per ottenere il miglior risultato di lucidatura possibile si consiglia di non lavorare mai a secco. Assicurarsi anche di rispettare sempre il numero di giri ottimale indicato in modo da ottimizzare il risultato e risparmiare lo strumento. Tutti gli strumenti di lucidatura Art2 possono essere disinfettati/sterilizzati e quindi utilizzati più volte.





# Lucidatura a specchio al quadrato: strumenti di lucidatura Art2 per compositi.


La combinazione perfetta di lucidatura a specchio ottenuta rapidamente e nello stesso tempo lunga durata: ecco cosa si riesce a ottenere in due passaggi con gli specialisti Art2 per compositi. Prima la finitura con una diamantata anello rosso oppure con uno strumento in carburo di tungsteno. Segue la lucidatura con lo strumento diamantato per la lucidatura. Poi: fatto!

## Vantaggi

- perfetta lucidatura a specchio dall'aspetto naturale in solo due passaggi
- lunga durata, elevata economicità
- strumento di colore rosa per la lucidatura iniziale adatto a modellare la forma e a lisciare
- strumento flessibile di colore giallo chiaro per la lucidatura a specchio finale

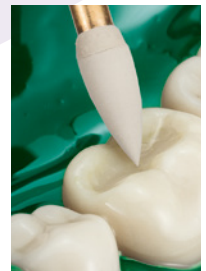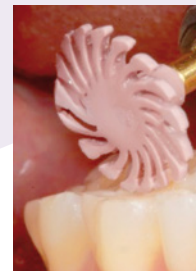


Utilizzo ottimale:  $\odot_{opt}$  6.000 giri al min.<sup>-1</sup>  
A lievissima pressione operativa.

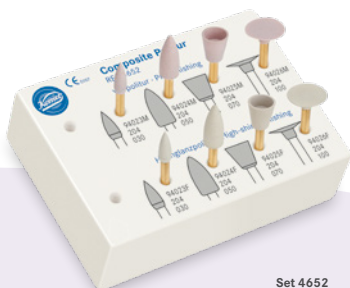

**Set 4652**  
Sistema di lucidatura  
per compositi a 2 passaggi




**Set 4669**  
Sistema di lucidatura  
per compositi a 2 passaggi

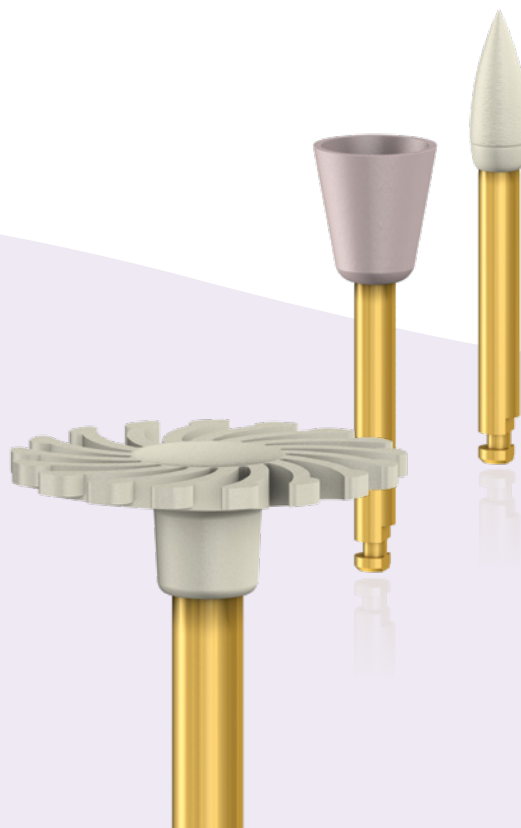



# Raddoppiano e semplificano: frese a finire Q + Art2.

Il non plus ultra per la finitura di compositi: La combinazione tra frese a finire Q in carburo di tungsteno e strumenti di lucidatura Art2 in 2 passaggi. Questi strumenti in carburo di tungsteno sono in grado di produrre superfici più lisce rispetto agli strumenti diamantati comparabili. In questo modo si

risparmia tempo e fatica nella successiva lucidatura: con gli strumenti di lucidatura Art2 si ottengono superfici pressoché planari con un livello elevato di brillantezza estetica. In base al livello di finitura, spesso è possibile addirittura tralasciare il primo passaggio di lucidatura.

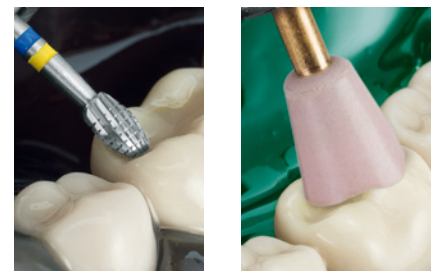

Set 4679  
Lavorazione di compositi

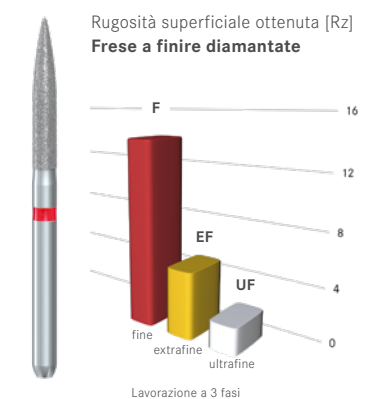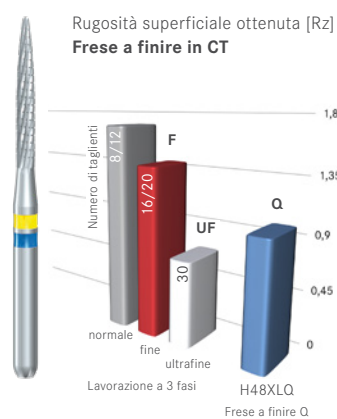

**Suggerimento:** Nel caso in cui per i denti prossimi risultasse necessario realizzare delle superfici molto naturali, si consiglia uno strumento diamantato per preparare e realizzare la tessitura superficiale con l'ausilio dei gommini per il 1° passaggio leggermente abrasivi. A tal fine Art2 è il metodo di lucidatura giusto per ogni esigenza di rifinitura.






# Diamantate ZR + strumenti di lucidatura Art2 per le sfide ceramiche.

Le ceramiche integrali rappresentano una delle sfide maggiori per odontoiatri e odontotecnici. Sono veramente difficili da lavorare per le caratteristiche del materiale straordinariamente duro. Tuttavia la loro longevità e l'estetica naturale fanno di queste ceramiche un materiale praticamente senza alternative. Komet offre per le ceramiche ad alte prestazioni le diamantate ZR appositamente sviluppate a tale scopo. Questi strumenti convincono grazie

all'elevata durata e alla contemporanea capacità di asportazione, migliore rispetto agli strumenti diamantati tradizionali. Gli strumenti di lucidatura Art2 provvedono a realizzare successivamente un'efficace lucidatura a specchio.

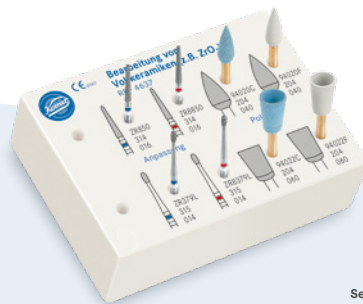

**Set 4637**

Con il kit composto dalle diamantate ZR e dagli strumenti di lucidatura Art2, Komet offre una soluzione competente per l'adattamento e la correzione dei restauri.



# Go for Gold!



## Strumenti di lucidatura a 2 passaggi per tutte le leghe.

I restauri tradizionali in metallo hanno sempre la loro ragion d'essere, vale ancora il "gold standard". Per queste lavorazioni sono disponibili gli strumenti di lucidatura per leghe metalliche della Komet nella versione marrone e verde: per la lucidatura di amalgama, di leghe di metalli nobili e di leghe di metalli non nobili.

Gli strumenti di lucidatura di colore marrone vengono utilizzati per la lucidatura iniziale e per le correzioni di precisione, gli strumenti di lucidatura di colore verde vengono impiegati durante il passaggio successivo per la brillantatura. In questa gamma le forme maggiormente apprezzate sono la fiamma piccola (9608, 9618) e la coppetta (9606, 9616).


### Vantaggi

- utilizzo universale su tutti i metalli
- stabilità dimensionale
- adatti all'utilizzo intraorale

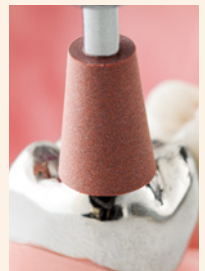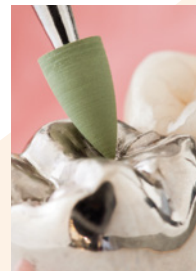

Utilizzo ottimale:

🔄<sub>opt.</sub> 6.000 giri al min.<sup>-1</sup>

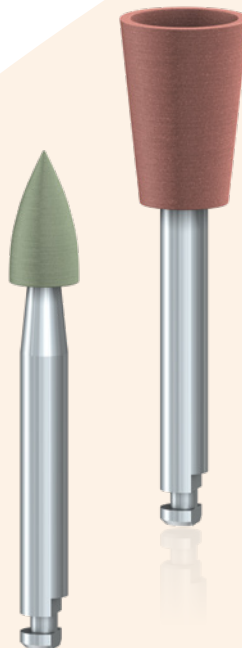


# Doppia soddisfazione: gli strumenti di lucidatura Art2 possono essere disinfettati/sterilizzati.

Se correttamente decontaminati, grazie alla loro lunga durata i preziosi strumenti di lucidatura della Komet possono regalare soddisfazioni durature. Prodotti per la pulizia e la disinfezione aggressivi tuttavia possono, in caso di superamento dei tempi di tenuta a bagno, intaccare la strumentazione. Se il prodotto utilizzato per la pulizia contiene alcol, le strutture molecolari dello strumento di lucidatura possono dissolversi in fase di preparazione. Con DC1, Komet offre una soluzione non alcolica completa, economica, di comprovata compatibilità con i materiali, con la quale procedere alla disinfezione dei prodotti senza complicazioni.

Ecco come fare:

Nel video applicativo della Komet per la corretta preparazione degli strumenti di lucidatura viene mostrato come è possibile trattare gli strumenti di lucidatura conformemente alle direttive.

Sempre attenti sul fronte della sicurezza e praticamente pronti al controllo successivo. Grazie alle Informazioni del produttore per la disinfezione/sterilizzazione è possibile assicurare una procedura validata conformemente alle direttive.

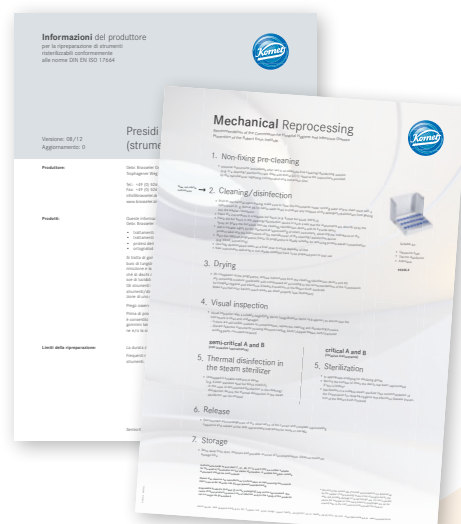

Komet Italia S.r.l.  
Via Fabio Filzi 2 · 20124 Milano

Telefono 02 67076654  
Telefax 02 67479318  
info@komet.it  
www.komet.it

---

