

## SonicLine: Schallspitzen für ein breites Anwendungsspektrum

Komet hat das Schallspitzenprogramm massiv ausgeweitet und dem Kind einen Namen gegeben: „SonicLine“. Die oszillierenden Instrumente unterstützen den Behandler im Rahmen der Prophylaxe, Parodontologie, Implantatprophylaxe, approximalen Kavitätenpräparation, Kronenstumpfpräparation, Füllungsbearbeitung, Kieferorthopädie, Veneertechnik, Fissurenbearbeitung, Endodontie und oralen Chirurgie.

Bei der SonicLine handelt es sich um qualitativ hochwertige, in Deutschland hergestellte Schallspitzen, die durch eine rundum aktive, elliptische Schwingungsweise einen effektiven Abtrag erzielen. Dank der eindeutigen Kennzeichnung ist das Handling leicht: Die Bestellnummer ist auf die Schallspitze gelasert und mit Feinkorn diamantierte Spitzen sind an einem roten Farbpunkt zu erkennen. Fest steht: Die SonicLine wird weiterhin wachsen, so dass Komet von Anfang an auch an praktische Details gedacht hat.

### Passendes Schallhandstück

Das luftbetriebene Schallhandstück SF1LM ergänzt das professionelle Sortiment. Es wird einfach auf den Turbinenschlauch der Behandlungseinheit gesteckt und passt auf alle KaVo MULTIflex®-Kupplungen.



Abb. 1: SF1LM Luftbetriebenes Schallhandstück



Abb. 2: Spüladapter SF1978 für Schallspitzen



Abb. 3: Spüladapter SF1977 für Kühladapter

Zwei gebündelte Lichtaugen leuchten das Arbeitsfeld optimal aus und erlauben ein sehr effizientes Vorgehen bei einer Betriebsfrequenz von 6.000 Hz. Der Leistungsregler lässt sich stufenlos einstellen. Die durchgehende Edelstahl-Außenhülse ohne tiefe Rillen liefert beste Voraussetzungen für eine sichere Aufbereitung. Komet bietet für das SF1LM Schallhandstück eine Herstellergarantie über zwei Jahre. Darüber hinaus können die Schallspitzen von Komet auch in folgenden Schallhandstücken eingesetzt werden:

- in den Scaler der Firma W&H (Serie Synea® ZA-55/L/M/M) oder der Serie Alegra® ST ZE-55RM/BC)
- in den SONICflex®-Handstücken der Firma KaVo (Serie 2000 oder 2003)
- in das SIRONAIR L der Firma Sirona.

Lediglich für die chirurgischen Schallspitzen gibt es eine Einschränkung: Sie dürfen nur in dem Komet SF1LM und den Schallhandstücken der Serie 2003 von KaVo eingesetzt werden.

### Praktische Spüladapter

Mit dem Spüladapter SF1978 ermöglicht Komet die validierte Aufbereitung der Schallspitzen in Miele Reinigungs- und Desinfektionsgeräten. Selbst für das Zubehör der chirurgischen Schallspitzen hat der führende Hersteller für rotierende Dentalinstrumente eine Lösung parat: Der Kühladapter SF1979 für chirurgische Schallspitzen, die unter externer Zuführung sterilen Kühlmediums arbeiten, kann mit dem Spüladapter SF1977 aufbereitet werden. Komet bietet diese Spüladapter für Schallspitzen als einziger Hersteller an.

### Weiterführende Infos

Mit der SonicLine bietet das Unternehmen ein durchdachtes Schallsystem an, das Sicherheit, Ökonomie und Qualität vereint. Einen Überblick über das gesamte Programm bietet eine Broschüre (405215). Tipps zur Wiederaufbereitung für Schallspitzen sind über die Herstellerinformation (405178) zu erhalten.



Abb. 4: Gerade Parospitze SF4 im Einsatz

### KONTAKT

Komet  
Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG  
Trophagener Weg 25  
32657 Lemgo  
Tel.: 052 61/701-700  
Fax: 052 61/701-289