



## Ein Koffer, alles griffbereit

Das DentinPost & Core Kit von Komet enthält alles in einem Koffer, was für die postendodontische Versorgung benötigt wird: Angefangen vom Wurzelstift DentinPost Coated samt passendem Instrumentarium für die Stiftbettpräparation über das selbststättende Bonding DentinBond Evo bis hin zum Stiftbefestigungs- und Stumpfaufbaucomposite DentinBuild Evo inkl. hilfreicher Formkappen für den Stumpfaufbau.

Das DentinPost & Core Kit bietet mit seinen optimal aufeinander abgestimmten Komponenten alles, was für einen schnellen, einfachen und sicheren Behandlungsablauf benötigt wird. Einmal aufgeklappt, kann mit System vorgegangen werden.


### /// DentinBuild Evo

DentinBuild Evo ist ein dualhärtendes Composite zur Stiftbefestigung und für den Stumpfaufbau. Dank der Zirkoniumdioxid-Füllkörper verfügt es über eine hohe Röntgenopazität. Es ist fließfähig, bearbeitbar wie Dentin und in den Farben A2 und Opak Weiß zur kontrastreichen Unterscheidung der Präparationsgrenze erhältlich. Dank DentinBuild Evo kann die Stiftbefestigung und der Stumpfaufbau aus dem gleichen Material umgesetzt werden. Das Composite befindet sich in der praktischen Minimix-Spritze, die ein einfaches Handling ohne Anmischen ermöglicht. Eine Minimix-Spritze enthält 9 g bzw. 5 ml, also die Menge, mit der ca. 12 Wurzelstifte befestigt und aufgebaut werden können.

DentinBuild Evo ist für die Befestigung und den Aufbau von Wurzelstiften aus glasfaserverstärktem Composite, Keramik und Titan geeignet. Die Druckfestigkeit beträgt 325 MPa, die Biegefestigkeit 145 MPa.

### /// DentinBond Evo

DentinBond Evo ist das passende Adhäsiv zum Composite DentinBuild Evo. Es handelt sich um ein dualhärtendes, selbststättendes Bonding. Als 1-Schritt System entfällt ein separates Ätzen mit Phosphorsäure, die Zahnhartsubstanz wird in einem Arbeitsgang für den Adhäsivverbund mit DentinBuild Evo vorbereitet. Das Adhäsiv ist in zwei Versionen erhältlich: als praktische Single Mix Kapsel oder als traditionelles 2-Flaschen-System.

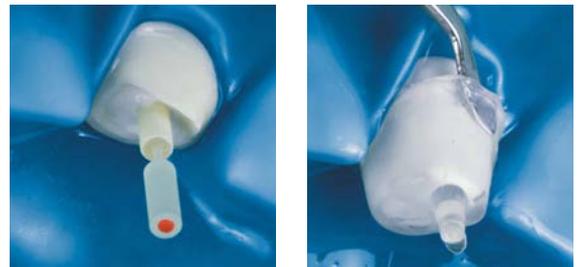

### /// DentinBuild Formkappen

Praktische Formkappen erleichtern den Stumpfaufbau. Dabei wird einfach eine passende Formkappe ausgewählt, mit DentinBuild Evo gefüllt und auf den Zahn aufgesetzt. Die Formkappen sind je nach Zahnregion in 6 Größen erhältlich.

### /// DentinPost Coated

Die Wurzelstifte aus glasfaserverstärktem Composite sind vollständig silikatisiert, silanisiert und mit einer haftvermittelnden Polymerschicht versehen, um apikal bis koronal identische Grenzflächen zwischen Stift und Composite zu gewährleisten. Damit kann eine optimale Verbundfestigkeit erzielt werden. Der durchgängige Adhäsivverbund wird beim praktischen Vorgehen durch das unbeschichtete Handlungsteil ermöglicht, das nach dem Einsetzen des DentinPost Coated durch leichtes Verkanten abgeknickt wird.

Wer sich über das DentinPost & Core Kit von Komet näher informieren möchte, fordert am besten die neue Composite-Broschüre an (405497). Darin wird die postendodontische Versorgung step by step bilderreich und verständlich erklärt.



Set 4613 | DentinPost & Core Kit

#### KONTAKT

GEBR. BRASSELER GmbH & Co. KG  
Postfach 160 · 32631 Lemgo

Telefon: 05261 701-700

Telefax: 05261 701-289

info@brasseler.de

www.kometdental.de