

Von der Aufbereitung bis zur Obturation

Komet bietet alles aus einer Hand – von der sicheren Wurzelkanalaufbereitung bis hin zur dichten, thermoplastischen Abfüllung. Die aufeinander abgestimmten Produkte F360, EasySeal und F360 Fill spielen dabei ihr ganzes Können aus.

Wie schön, wenn ein innovatives Produktportfolio für den Anwender ein schlüssiges Ganzes ergibt. Mit dem 2-Feilensystem F360, EasySeal für den apikalen Verschluss und dem carrierbasierten Obturationssystem F360 Fill für die abschließende Obturation bietet Komet ein System an, das ein endodontisches Vorgehen lege artis garantiert.

/// NEUE EFFIZIENZ MIT F360

Mit Hilfe von zwei NiTi-Feilen kann ein Großteil der Wurzelkanäle einfach und effizient aufbereitet werden. Die beiden F360 Feilen in den Größen 025 und 035 werden rotierend auf voller Arbeitslänge eingesetzt. Dank des schlanken Tapers 04 sind die Feilen sehr flexibel und passen sich jeder Kanalanatomie optimal an. Weil für alle Feilen das gleiche Drehmoment (1,8 Ncm) gilt, entfällt beim Feilenwechsel die Umstellung am Endo-Winkelstück. Die Praxis erhält die Single-use Instrumente steril verpackt. Das reduziert die Frakturgefahr durch zyklische Ermüdung, Kreuzkontaminationen sind ausgeschlossen und die Aufbereitung sowie die Dokumentation der Einsatzhäufigkeit entfallen, da die Feilen nur einmal verwendet werden.

/// SICHERER VERSCHLUSS MIT EASYSEAL


Nun ist es Aufgabe der Wurzelfüllung, durch einen dauerhaften, apikalen Verschluss des Kanals eine Reinfektion zu verhindern. Wurzelfüllmaterialien auf Epoxidharzbasis wie EasySeal, gelten u. a. deshalb als Goldstandard, weil sie eine sehr gute Haftung am Dentin erzielen, eine

geringe Löslichkeit aufweisen und außerdem temperaturstabil sind, d.h. dass der Anwender alle Wurzelfülltechniken, auch die thermoplastischen, bedenkenlos anwenden kann. EasySeal eignet sich für orthograde Füllungstechniken, ist selbststeril, röntgensichtbar und dimensionsstabil. Praktischerweise befindet sich das Produkt in einer Doppelkammerspritze, die ein einfaches und sicheres Handling ohne Anmischen ermöglicht. Eine Spritze enthält 12 g mit denen ca. 20 Wurzelfüllungen durchgeführt werden können. Die Verarbeitungszeit beträgt 15 Minuten, eine vollständige Aushärtung erfolgt bei 37°C Körpertemperatur innerhalb von 24 Stunden.

/// DICHTER OBTURATION MIT F360 FILL

F360 Fill ist ein carrierbasiertes Füllsystem für eine thermoplastische, dreidimensionale Wurzelfüllung. F360 Obturatoren bestehen aus einem Kunststoffkern, der mit thermoplastischer Guttapercha beschichtet ist und im F360 Fill Ofen erwärmt wird. Damit ist F360 Fill ein universelles Trägerstiftsystem, das u. a. ideal auf das 2-Feilensystem F360 abgestimmt ist und eine dichte Obturation des Wurzelkanals gewährleistet. Abgestimmt auf F360 bietet Komet übrigens auch passende Papier- und Guttaperchaspitzen-Sortimente an.

Warum sich also an verschiedene Adressen wenden und Produkte mischen, wenn Qualität und Präzision bei einem Hersteller stimmen? Komet bietet mit F360, EasySeal und F360 Fill ein sicheres System für die Endodontie und unterstreicht es mit der bewährten, individuellen Kundenbetreuung.

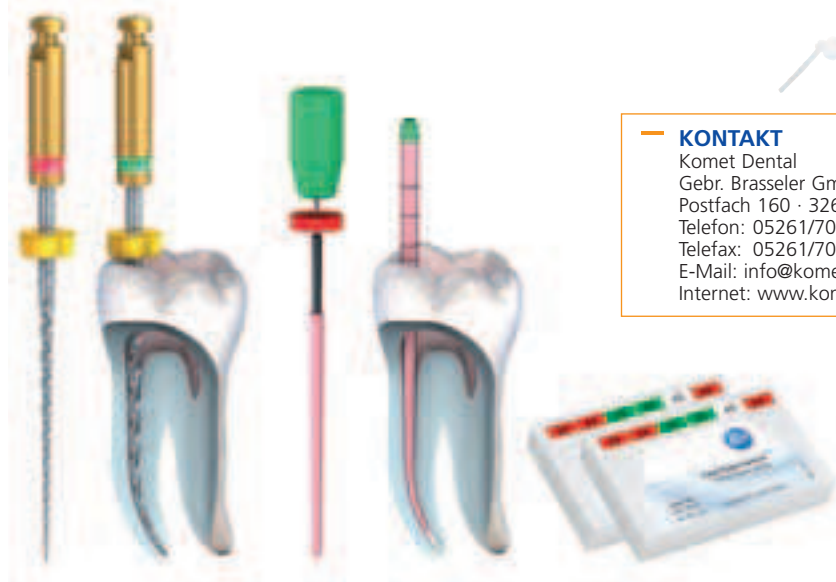

— KONTAKT

Komet Dental
Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG
Postfach 160 · 32631 Lemgo
Telefon: 05261/701-700
Telefax: 05261/701-289
E-Mail: info@kometdental.de
Internet: www.kometdental.de