



Schonende Hart- und Weichgewebearbeitung mit Hubfeilen

Dem TissueMaster Concept (TMC) nach Dr. Stefan Neumeyer, Eschlkam, liegt eine besonders Substanz schonende Philosophie zugrunde. Komet unterstützt die minimal-invasiven Verfahren mit innovativen Hubfeilen-Instrumenten für das Hart- und Weichgewebe.

Die Bewegungsform ‚Hub‘ zählte bisher zu den Spezialanwendungen in der Zahnarztpraxis, doch die Fan-Gemeinde für das oszillierende Arbeiten wächst stetig. Die Technik ist dem Zahnarzt geläufig vom Abtrag von Füllungsüberschüssen, der Ausarbeitung von Approximalfächchen, im Rahmen der KFO (Stripping) und in der Prophylaxe. Stets ist damit Ergonomie, Präzision und Effizienz verbunden.

/// HUBFEILEN FÜR DIE PA-BEHANDLUNG

Mit den diamantierten Hubfeilen in besonders ergonomischen Formen („surfer“, „smoother“, „beaver“) lassen sich Zahnwurzeloberflächen supra- und subgingival von Ablagerungen wie Plaque, Zahnstein und Konkrementen reinigen. Gleichzeitig ist eine Konturierung/Glättung der Wurzeloberfläche möglich. Die Instrumente werden unter steriler, externer Kühlung mit vorsichtigen, kontrollierten Bewegungen und geringer Anpresskraft am Zahnhals entlang in die Tiefe geführt.

/// HUBFEILEN SKALPELLE FÜR DAS WEICHGEWEBE

Die Hubfeilen Skalpell liefern hochpräzise, genaue Schnitte im Weichgewebe, z.B. im Rahmen einer Verschiebelappenplastik, bei der split thickness flap-Technik oder bei einer Bindegewebsentnahme. Der kleine Kopf („initial“) perforiert den Sulkus, der längere („advanced“) treibt den Schnitt weiter in die Tiefe und bei unterminierenden Arbeiten kommt schließlich Hubfeile Skalpell „extended“ zum Einsatz. Alle liefern hochpräzise, exakte Schnitte im Weichgewebe.

/// HUBFEILEN SÄGEN FÜR KNOCHENSCHNITTE

Die Hubfeilen Sägen („jig-saw“, „hedgehog“) sorgen für eine einzigartig schnelle und effektive Knochenbearbeitung z. B. im Rahmen der Kieferkammspaltung. Selbst bei stark atrophierten Kieferkämmen kann dank des nur 0,2 mm breiten Schnittes eine Kieferkammspaltung durchgeführt werden. Mit den Hubfeilen Sägen erreicht der Operateur in kürzester Zeit die gewünschte Tiefe.

/// RESÜMEE

Mit den innovativen Hubfeilen von Komet eröffnet eine altbekannte Technik durch neue Instrumentenformen neue Indikationsbereiche. Alle Hubfeilen werden einfach mit einer Applikationshilfe fest in das Hubwinkelstück eingeführt. Sie verleihen der oszillierenden Arbeitsbewegung für zahlreiche Indikationen an Hart- und Weichgewebe neuen Glanz.

— KONTAKT

Komet Dental
Gebr. Brasseler GmbH & Co KG
Trophagener Weg 25
32657 Lemgo
Telefon: +49(0)5261/701-700
Telefax: +49(0)5261/701-289
E-Mail: info@kometdental.de
Internet: www.kometdental.de

