



Attraktives F360 Einführungsset

Das innovative Produktportfolio rund um F360 ergibt für den Anwender ein schlüssiges Ganzes. Ein eigens zusammengestelltes Einführungsset 4634 weckt nun die Neugier aller, die die Wurzelkanalaufbereitung mit zwei Feilen testen möchten.

Nie war es einfacher, das innovative Instrumentendesign des Feilensystems F360 einmal in der Praxis auszuprobieren. Das neue Gefühl bei der Wurzelkanalaufbereitung liegt im Design:

Mit Hilfe von zwei NiTi-Feilen kann ein Großteil der Wurzelkanäle einfach und effizient aufbereitet werden. Die beiden F360 Feilen in den Größen 025 und 035 werden rotierend auf voller Arbeitslänge eingesetzt. Dank des schlanken Tapers 04 sind die Feilen sehr flexibel und passen sich jeder Kanal Anatomie optimal an. Für breitere Kanäle sind Zusatzgrößen in 045 und 055 verfügbar, außerdem sind die F360 Feilen in 3 Längen (L21, L25 und L31) erhältlich. Der flexible Doppel-S-Querschnitt sorgt in Verbindung mit einem großen Spanraum und einem dynamischen Drall für eine hohe Reinigungsleistung und gleichzeitige Präzision bei der Aufbereitung. Weil für alle Feilen das gleiche Drehmoment (1,8 Ncm) gilt, entfällt beim Feilenwechsel die Umstellung am Endo-Winkelstück. Die Praxis erhält die Single-use Instrumente steril verpackt. Das reduziert die Frakturgefahr durch zyklische Ermüdung, Kreuzkontaminationen sind ausgeschlossen und die Aufbereitung sowie die Dokumentation der Einsatzhäufigkeit entfallen, da die Feilen nur einmal verwendet werden.

/// ARBEITEN MIT SYSTEM

F360 wird von perfekt abgestimmten Produkten für die Obturation begleitet:

- Speziell auf die F360 Feilen abgestimmte Guttapercha- und Papierspitzen, zusammengefasst in je einem Sortiment
- F360 Fill: Mit dem carrierbasierten Obturationssystem kann eine dichte, dreidimensionale Wurzelfüllung erfolgen. Die F360 Obturatoren bestehen aus einem Kunststoffkern, der mit thermoplastischer Guttapercha beschichtet ist und im F360 Fill Ofen erwärmt wird.
- EasySeal: das Wurzelfüllmaterial EasySeal auf Epoxidharzbasis für den dauerhaften, apikalen Verschluss eignet sich für orthograde Füllungs-techniken, ist selbststeril, röntgensichtbar, dimensions- und temperaturstabil. Praktischerweise befindet sich das Produkt in einer Doppelkammerspritze, die ein einfaches und sicheres Handling ohne Anmischen ermöglicht.



Abb. 1: Den F360 Einführungskoffer gibt es jetzt zum Aktionspreis.

/// STEP BY STEP KARTE

Jedem Feilenblister liegt eine Step by Step Karte bei, auf der in sieben schematischen Bildern das Vorgehen mit F360 – von der großzügigen Aufbereitung des Kanaleingangs bis zur Abfüllung – beschrieben wird.

/// EINFÜHRUNGSSET 4634

Nach dem Motto „Ausgefeiltes System, kleingefeilter Preis“ bietet Komet das F360 Einführungsset 4634 an. Darin enthalten sind zwei F360 Blister, 6 K-Feilen, ein Opener, ein Endo-Interimstand sowie ein F360 Guttapercha- und Papierspitzenortiment – also alles, um erfolgreich in die einfache und sichere Wurzelkanalaufbereitung einzusteigen!



Abb. 2: Mit dieser Step by Step-Karte bleibt keine Frage zur Wurzelkanalaufbereitung mit F360 offen.

KONTAKT

Komet Dental
Gebr. Brasseler GmbH & Co.KG
Trophagener Weg 25
32657 Lemgo
Telefon: 05261/701-700
Telefax: 05261/701-289
E-Mail: info@kometdental.de
Internet: www.kometdental.de

