

Prophylaxe: Alles aus einer Hand

Egal ob Polierer, Bürsten, Schall- oder Ultraschallspitzen: Das Prophylaxe-Komplettangebot von Komet kombiniert immer Hygiene, Flexibilität und Wirtschaftlichkeit für alle, die auf Nummer sicher gehen wollen. Schön, all das von einem Anbieter zu erhalten!

Die „Brot und Butter“-Instrumente in der Prophylaxe sind Polierer und Bürsten. Komet bietet 3 verschiedene Versionen an:

- Pop-On-Polierer und -Bürsten zum Aufstecken in ein Prophylaxewinkelstück oder auf den Träger REF 309.204,
- Screw-In-Polierer und -Bürsten zum Aufschrauben in ein Prophylaxewinkelstück oder in den Träger REF 312.204 und
- auf den Winkelstückschaft montierte Polierer und Bürsten.

Praktische Einmalprodukte, die Hygiene, Flexibilität und ökonomisches Arbeiten elegant verbinden. Wer sich also für die montierte Variante entscheidet, kann das Instrument bequem ohne weiteren Zwischenschritt bzw. Zeitaufwand einspannen. Die preisgünstigeren Alternativen ohne Schaft können wahlweise aufgedreht (Screw-In) oder aufgesteckt (Pop-On) werden. Nach der Anwendung wird der Träger aufbereitet und wieder verwendet. Lediglich das Arbeitsteil wird entsorgt.



Ausgewählte Komet-Broschüren im Überblick:
Prophylaxe Broschüre (410354), SonicLine Broschüre (410356) und
PiezoLine Broschüre (410007)

/// ARBEITEN MIT SCHALL BZW. ULTRASCHALL

Die Vorteile bei der maschinellen Entfernung von Zahnstein und Belägen sind sowohl mit den beliebten SonicLine-Schallspitzen SF 1-4 (Abb. 1) als auch mit den neuen PiezoLine-Ultraschallspitzen (Abb. 2) offensichtlich: Beide Produktlinien erlauben präzises, zügiges und ermüdungsfreies Arbeiten bei gleichzeitiger Schonung der Zahnhartsubstanz und des Weichgewebes. Für welche Technik sich der Anwender entscheidet, ist reine Geschmackssache bzw. eine Frage der vorhandenen technischen Ausstattung. Arbeiten mit Schall zeichnet sich durch eine rundum aktive, elliptische Schwingungsweise und ein luftbetriebenes Schallhandstück (z.B. SF1LM) aus. Ultraschallspitzen erzielen durch eine lineare Arbeitsweise mit Hilfe piezoelektrischer Antriebe eine effektive Abtragsleistung. Die PiezoLine Ultraschallspitzen können in einem EMS-Gerät (Piezon® Master 700, MiniMaster®, MiniMaster® LED und MiniPiezon®) oder dem

Titanus® E der Firma Tekne Dental eingesetzt werden. In Kürze wird die PiezoLine auch um Ultraschallspitzen für Sirona-Handstücke erweitert.

/// WAS NOCH DAZUGEHÖRT

Sowohl die SonicLine- als auch die PiezoLine-Spitzen sind langlebig. Dennoch gilt es, das Maß der Abnutzung regelmäßig zu überprüfen. Hierfür stellt Komet gratis Spitzenprüfkarten zur Verfügung (SonicLine Nr. 411634, PiezoLine Nr. 411698). Zu dem beeindruckenden Prophylaxe-Sortiment von Komet zählen noch viele weitere Produkte, z.B. Interdental- und SiC-Bürsten, Finierstreifen und Instrumentenständer. Eine Übersicht bietet die aktu-



Abb. 1: Die beliebtesten Komet-Schallspitzen für die Prophylaxe; insgesamt stehen für die Prophylaxe/Paro 7 Spitzen zur Auswahl.



Abb. 2: Die beliebtesten Komet-Ultraschallspitzen für die Prophylaxe; insgesamt stehen für die Prophylaxe/Paro 11 Spitzen zur Auswahl.

elle Prophylaxebroschüre. Auf 30 Seiten wird das gesamte Portfolio anschaulich erklärt. Und wer sämtliche Infos besonders schnell einholen möchte, der klickt sich am besten gleich auf www.kometdental.de ein. Hier steht die Prophylaxebroschüre zum Download bereit. Das Prophylaxe-Sortiment von Komet immer nach dem Motto: Alles aus einer Hand von Komet, der Marke für ausgewählte Präzisionsinstrumente!

KONTAKT

Komet Dental
Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG
Trophagener Weg 25
32657 Lemgo
Telefon: 05261/701-700
Telefax: 05261/701-289
E-Mail: info@kometdental.de
Internet: www.kometdental.de

