

F6 SkyTaper: ein neues Level der Flexibilität

Feilenmanagement ist reine Geschmackssache. Das weiß man auch bei Komet und antwortete zur IDS 2015 mit dem rotierenden 1-Feilensystem F6 SkyTaper aus Nickel-Titan.

Die herausragenden Eigenschaften von F6 SkyTaper: ein lückenloses Feilenspektrum mit beeindruckender Flexibilität in Feilendesign und Anwendung.

Feilenmanagement ist reine Geschmackssache. Zahnärzte, die gerne auf ein 1-Feilensystem umsteigen möchten, finden mit F6 SkyTaper eine rotierende Alternative. Das neue System besticht Endo-Spezialisten wie Allgemein Zahnärzte durch ein lückenloses Feilenspektrum mit kompromissloser Flexibilität.

/// WAS HEISST FLEXIBEL?

– *Flexibilität im System:* Für jede Kanal anatomie eine Feile. F6 SkyTaper ist in fünf unterschiedlichen Größen und drei Längen erhältlich.

– *Flexibilität in der Anwendung:* Bei F6 SkyTaper kann die Obturationsmethode dank dem (gleichbleibenden) Taper .06 frei gewählt werden. Auch die Aktivierung der Spülung z.B. mit der SonicLine Spülspitze SF65, kann effizient vorgenommen werden. Der rotierende Einsatz ist in allen drehmomentbegrenzten Endo-Winkelstücken und –motoren möglich.

– *Flexibilität in der Feile:* Der Werkstoff Nickeltitan und das Feilendesign mit effizientem Doppel-S-Querschnitt sorgen für eine hohe Reinigungsleistung unter gleichzeitiger Einhaltung des originären Kanalverlaufs.

/// TIPPS ZUM SICHEREN INSTRUMENTIEREN

Für die koronale Erweiterung des Wurzelkanals dient zunächst der Opener OP10L19, der sich großzügig voranarbeitet und den Kanal bereits zu Anfang der Behandlung zuverlässig vom Großteil der Bakterien befreit. Zur Gleitpfaderstellung empfiehlt sich der PathGlider. Nun kann die mechanische Aufbereitung rotierend auf voller Arbeitslänge in „picking motion“ mit der passenden F6 Fei-



le beginnen. Welche Feile gewählt wird, hängt vom zuvor hergestellten Gleitpfad ab – in den meisten Fällen wird die F6 SkyTaper Feile in Größe 025 verwendet.

/// RUNDUM-SERVICE

Durch die sterile Verpackung und dem single-use Charakter der F6 SkyTaper Instrumente, wird die Frakturgefahr reduziert, das Risiko einer Kreuzkontamination ausgeschlossen und Aufbereitung und Dokumentation entfallen. Für den Überblick über das komplette Produktsortiment können die umfangreiche Endo-Broschüre und der Abrechnungsleitfaden von Komet online eingesehen und bestellt werden. Außerdem lohnt sich auch dieses Jahr ein Blick auf das Endo-Fortbildungsangebot von Komet.

Mit der Einführung von F6 SkyTaper wird das Endo-Sortiment erneut erweitert, das Service-Konzept gelebt und das von Komet gewohnte System- und Qualitätsdenken unterstrichen.



Qualitätsdenken unterstrichen.

■ KONTAKT

Komet Dental
Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG
Trophagener Weg 25
32657 Lemgo
Telefon: 05261/701-700
Telefax: 05261/701-289
E-Mail: info@kometdental.de
Internet: www.kometdental.de

