

EndoGuard stellt die Weichen auf Endo-Erfolg

Das Erstellen einer optimalen Zugangskavität bildet den Grundstein einer erfolgreichen endodontischen Behandlung. Durch den Einsatz des EndoGuard gestaltet sich dieser essentielle Behandlungsschritt jetzt nicht nur spielend leicht, sondern auch noch besonders effizient.

Der EndoGuard stellt die Weichen bereits zu Beginn der Behandlung auf Endo-Erfolg. Das Aufspüren aller Wurzelkanäle, hervorragende Sicht und der geradlinige Zugang zum Wurzelkanalsystem – alles Faktoren, die das Behandlungsergebnis essentiell beeinflussen. Die Präparation der Zugangskavität ist daher häufig aufwendiger als die anschließende, eigentliche Wurzelkanalaufbereitung. Schön, wenn dann ein Spezialinstrument hilft!

/// SICHT HEISST SICHERHEIT

Der EndoGuard ist das erstaunliche Ergebnis der fast 100 Jahre währenden Komet Unternehmensefahrung in der Erstellung innovativer rotierender Instrumente. Es ist gelungen, den langwierigen und schwierigen Schritt der Zugangskavitätenpräparation durch ein durchdachtes Instrumentendesign deutlich effizienter und einfacher zu gestalten.

- **Optimale Zugangskavität:** Nach initialer Öffnung der Pulpakammer wird durch den Abtrag von Dentinüberhängen die Sicht auf die Kavität erleichtert. Der gradlinige Zugang zum Wurzelkanalsystem minimiert die Gefahr einer Kanaltransportation sowie das Risiko einer Feilenfraktur.
- **Schutz des Pulpakammerbodens:** Der EndoGuard ist mit einer glatten, nicht verzahnten Spitze ausgestattet. Hierdurch wird der Pulpakammerboden geschützt und ein exzessiver Abtrag von Zahnhartsubstanz vermieden.
- **Keine Präparation von Unterschnitten:** Aufgrund seiner konischen Form wird die Präparation von Unterschnitten weitestgehend vermieden. Dies stellt sicher, dass kein infiziertes Gewebe im Pulpakavum verbleibt.
- **Effiziente Kreuz-Verzahnung:** Die Kreuz-Verzahnung sorgt für ein besonders effizientes und ruhiges Arbeiten. Dies garantiert die volle Kontrolle über das Instrument, zu jedem Zeitpunkt.



/// ENDO-VOLLSORTIMENT

Komet baut sein Endo-Sortiment kontinuierlich aus. Gemeinsam mit dem H1S-ML bildet der EndoGuard das perfekte Duett der Zugangspräparation. Ermöglicht der EndoGuard das Auffinden der Wurzelkanäle, ist der H1SML durch seinen langen, schlanken Hals der perfekte Partner für die Isthmuspräparation. Komet auf Endo-Kurs: Auch im Bereich der Wurzelkanalaufbereitung wurde in letzter Zeit kräftig expandiert – wie immer mit genauem Blick auf die Kundenbedürfnisse. Opener (Kanaleingangserweiterer) und PathGlider (maschinelle Gleitpfaderstellung) haben sich innerhalb kurzer Zeit zu echten Kundenlieblingen entwickelt. Schnell, einfach und sicher muss die Endo heute sein – damit entsprechen die beliebten Feilensysteme F360 und F6 SkyTaper ganz genau den Bedürfnissen der Zeit.

/// RUNDUM-SERVICE

Für den Überblick über das komplette Produktsortiment können die umfangreiche Endo-Broschüre und der Abrechnungsleitfaden von Komet online eingesehen und bestellt werden. Ein Blick auf das Fortbildungsprogramm Endo FIT lohnt sich! Mit Tipps und Tricks von renommierten Endo-Spezialisten wird nicht nur die Effizienz der Behandlung, sondern auch der Spaß an der Endo gesteigert.

— KONTAKT

Komet Dental
Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG
Trophagener Weg 25
32657 Lemgo
Telefon: 05261/701-700
Telefax: 05261/701-289
E-Mail: info@kometdental.de
Internet: www.kometdental.de

