



DC1: die sichere Komplettlösung

Mit DC1 steht ein kombiniertes Reinigungs- und Desinfektionsmittel zur Verfügung, das die zahnärztlichen Instrumente maximal schont, selbst wenn die Einlegezeit mal überschritten wird. So können sich Zahnarzt und Assistenz stets auf der sicheren Seite fühlen!

Oft führen aggressive Reinigungs- und Desinfektionsmittel dazu, dass das zahnärztliche Instrumentarium angegriffen wird – nicht so bei der materialverträglichen und wirtschaftlichen Komplettlösung DC1 von Komet. Wurden bisher in der Regel sowohl Bohrerbäder als auch Instrumentenbäder benötigt, so steht mit DC1 ein kombiniertes Reinigungs- und Desinfektionsmittel zur Verfügung, das die zahnärztlichen Instrumente maximal schont, selbst wenn die Einlegezeit mal überschritten wird. Damit ist DC1 das ideale, universelle Konzentrat für Hartmetallbohrer und –finierer, Kronentrenner, Keramikinstrumente, Diamantschleifer, Wurzelkanalinstrumente, chirurgische Instrumente, Schallspitzen, Gummipolierer, keramische Schleifkörper und Handinstrumente (z.B. Zangen, Sonden, Mundspiegel, Küretten).

/// Profitable Konzentrationen

Bei der unverzichtbaren Vorreinigung der rotierenden Instrumente ist die viruzide (wirksam entsprechend den Anforderungen des RKI gegen behüllte Viren inkl. HBV, HCV und HIV), bakterizide (inkl. TBC und MRSA) und fungizide Wirkung bereits bei einer 1%igen Konzentration von DC1 nach 60 Minuten gegeben. Wenn es einmal schneller gehen muss, profitiert die Praxis von der Möglichkeit einer 30-minütigen Einwirkzeit mit einer 2%igen Konzentration oder von einer 15-minütigen Einwirkzeit mit einer 3%igen Konzentration. Wird anschließend manuell aufbereitet, werden nur 5 Minuten benötigt, wenn das Instrumentarium in einer 2%igen Lösung im Ultraschallbad desinfiziert wird. Damit wird klar: Das VAH-zertifizierte und -gelistete Konzentrat ist höchst ergiebig und schont gleichzeitig die Instrumente, da es alkoholfrei ist.

/// Ökologisch und wirtschaftlich handeln

DC1 enthält weder Phenole noch Aldehyde, ist gemäß der OECD-Richtlinie biologisch abbaubar und kann auch für die nicht-fixierende Vorreinigung eingesetzt werden. Kostenvorteile entstehen, da 100 Liter gebrauchsfertige

Lösung (1% aus nur 1 Liter DC1 generiert werden können. Zusätzliche wirtschaftliche Pluspunkte sind der deutlich reduzierte Platzbedarf sowie ein leichteres Handling durch eine Dosierhilfe.

Steckbrief DC1

- ergiebig (1l Konzentrat = 100l gebrauchsfertige Lösung)
- universell einsetzbar zur Reinigung und Desinfektion
- für alle rotierenden Instrumente und Handinstrumente
- materialverträglich
- praktische Dosierflasche
- VAH-zertifiziert
- aldehydfrei, somit nicht fixierend
- alkoholfrei

/// Tipps für die Anwendung

Zur Vorbehandlung werden die Instrumente unverzüglich nach Benutzung in die DC1 Gebrauchslösung eingelegt. Nach erfolgter Reinigung und Desinfektion (bei Bedarf im Ultraschallbad) wird das Instrumentarium unter fließendem Wasser abgespült und mittels Luftstrom getrocknet. Bei hartnäckigen Verschmutzungen ggf. abbürsten und den Desinfektionsvorgang wiederholen und danach sterilisieren. DC1 ist für Temperaturen bis 60°C geeignet. Bei mit Blut belasteten Instrumenten sollten wegen Eiweißgerinnung 45°C nicht überschritten werden.

Für eine Bestellung führen drei Wege zum Ziel: Der persönliche Komet-Fachberater, die Komet-Hotline Verkauf (Tel. 05261 701-700) oder das Internet unter www.kometdental.de. Dabei kann auch gleich das kostenlose Aufbereitungsposter als praktische „Eselbrücke“ für die manuelle und maschinelle Aufbereitung zahnärztlicher Instrumente angefordert werden!



KONTAKT

Komet Dental
Gebr. Brasseler GmbH & Co KG
Trophagener Weg 25
32657 Lemgo
Tel.: +49(0) 5261/701-700
Fax: +49(0)5261/701-289
E-Mail: info@kometdental.de
Internet: www.kometdental.de

