



Алюминиевые боксы | Стерилизуемые подставки для инструментов



Подставки для индивидуально подобранного комплекта инструментов.

Сегодня у доктора есть огромный выбор инструментов для работы, а это значит, что в своей практике он применяет особые методы лечения и предпочитаемые им техники препарирования. Более того, важную роль играет экономический и гигиенический аспекты.

Алюминиевые подставки Комет для инструментов сочетают в себе функциональность и индивидуальность. Они подходят для инструментов, выбранных специально для индивидуальных методов лечения и техник препарирования. Эти подставки могут быть использованы для инструментов под турбину, под угловой и прямой наконечники.

Откидывающаяся крышка защищает инструменты от повреждения и предотвращает их выпадение из подставки.

Доктор может расставить инструменты, исходя из собственных потребностей и своего удобства. По окончании препарирования использованные и неиспользованные инструменты дезинфицируются, очищаются с применением подходящего средства и стерилизуются. Подставки для инструментов Комет обеспечивают эргономичную, гигиеничную и экономичную работу.

**A100S.000**

Для 10 инструментов под турбину и
5 инструментов под угловой наконечник
(41 x 25 x 29мм)



A100B.000 | A100G.000 | A100R.000

**A500S.000**

Для 10 инструментов под турбину
(41 x 25 x 29мм)



A500B.000 | A500G.000 | A500R.000

**A600S.000**

Для 20 инструментов под турбину и
10 инструментов под угловой наконечник
(73 x 25 x 29мм)



A600B.000 | A600G.000 | A600R.000

**A700S.000**

Для 15 инструментов под прямой
наконечник
(41 x 25 x 64мм)



A700B.000 | A700G.000 | A700R.000

Рекомендации по применению:

- Проводите дезинфекцию и очищение, используя только подходящие для этой цели дезинфицирующие средства (например, Комет DC1).
- При очищении и дезинфекции соблюдайте рекомендации производителя относительно сочетаемости материалов, концентрации и времени выдержки.
- Удалите пятна, если они имеются, немедленно после дезинфекции.
- Перед стерилизацией подставка для инструментов должна быть промыта под проточной водой и тщательно высушена, особенно это касается отверстий (используйте для этой цели, например, поток сжатого воздуха).
- Промытую и высушенную подставку для инструментов необходимо запечатать в стерилизационную бумагу и автоклавировать при 135°C и при 2.2 бар.

