


SonicLine

Scaler/Perio | SF1-8

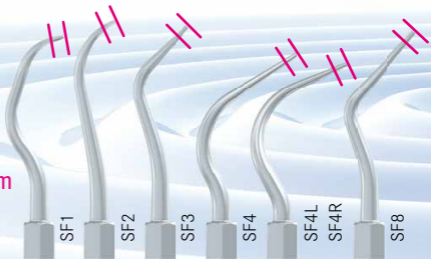

== máx. 2 mm



Indicación/Indicação

Nivel de potencia SF1LM/S Nível de potência SF1LM/S

	1	2	3
Scaler	1	2	3
Limpieza de implantes/Limpeza dos implantes	1	2	●
Tratamientos periodontales/Periodontal	1	2	3
Prep. de coronas/Prep. coroas, Stripping/Shaping	1	●	●
Prep. de cavidades, Inlay	1	●	3
Técnica veneers/Técnica Veneer, Micro/Bevel	1	●	●
Apertura de fisuras/Tratamento de fissuras	1	2	3
Endodoncia*/Endodontia*	1	2	●
Cirugía**/Cirurgia**	1	2	●

Atención: *SF65, **SFS103 - 105 puede utilizarse sólo en el nivel 1.

Atenção: *SF65, **SFS103 - 105 somente permitido no nível 1.

**SFS100/101/102/109 también 3.

**SFS100/101/102/109 também 3.

● permitido/permitido

● permitido sólo brevemente/apenas temporar. permitido

● prohibido/não permitido