


SonicLine

Скалеры для

Пародонтологии | SF1-8



== макс. 2 мм

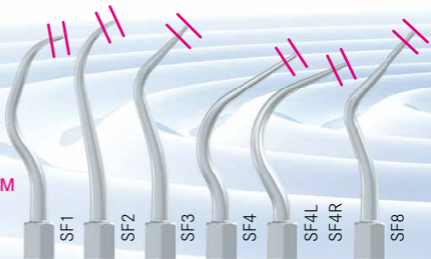

Назначение

Уровень мощности SF1LM/S

	1	2	3
Скалеры	1	2	3
Профилактическая чистка имплантатов	1	2	●
Пародонтология	1	2	3
Препарирование уступа, Шлифование/Формирование	1	●	●
Препарирование полости, Вкладки	1	●	3
Препарирование под виниры, Микро/Скос	1	●	●
Раскрытие фиссур	1	2	3
Эндодонтия*	1	2	●
Хирургия**	1	2	●

Внимание: *SF65, **SFS103 – 105 только на уровне 1.

**SFS100/101/102/109 допускается на уровне 3.

- разрешено
- разрешено лишь на короткий период
- запрещено