

Compás | Cepillos para el laboratorio dental

Recomendaciones para el uso económico de cepillos de pulido



	Cerdas naturales blandas	Cerdas naturales medias	Cerdas naturales rígidas	Alambre de acero *	Cepillos SIC *	Mopa abrasiva *	Fieltro	Mopa algodón
	 9638.104.120	 AR9463.104.190	 9449.900.190 9449.900.220	 9637.900.220	 9452C.900.220	 9485C.104.250	 9629.900.210	 9628.900.220
	 9638.900.190 9638.900.220	 AR9464.104.190	 9451.900.220		 9452M.900.220	 9485M.104.250		 9448.900.220
					 9452F.900.220	 9485F.104.250		

Pasta de pulido de diamante

- REF 9300 - D 3 (2 - 5 µm)
- REF 9301 - D 7 (5 - 10 µm)

Dentaduras parciales/completas Resina para dentaduras								
Carillas Resina para carillas								
Facetas, carillas, inlays, coronas Cerámicas dentales								
Inlays, coronas, puentes Aleaciones de metales preciosos								
Inlays, coronas, puentes Aleaciones con contenido reducido de metales preciosos								
Coronas, puentes Aleaciones de metales no preciosos								
Rebases para dentaduras Modelos colados								
Coronas, puentes, rebases para dentaduras Titanio								
Velocidad recomendada: ○... 5.000 - 6.000 rpm	Limpieza/Pulido inicial						Pulido	Pulido brillante

!No observar las velocidades máximas permitidas conlleva un elevado riesgo de seguridad!

* Sin pasta de pulir

Tanto colores como productos están sujetos a alteraciones, exceptuando errores de impresión.

Komet Dental - Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG - Postfach 160 - 32631 Lemgo - Export: Telefon +49 (0) 5261 701-0 - Telefax +49 (0) 5261 701-329 - export@kometdental.de - www.kometdental.de

© 02/2018 - 4108161Z

