



MinutenWipes



AP3046

AP3040

Lingettes pour la désinfection et le nettoyage des surfaces.

Lingettes imprégnées pour la désinfection et le nettoyage rapides des surfaces et des dispositifs médicaux non-critiques et du mobilier comme par exemple les manettes d'unit, les tablettes, l'unit, etc ...

- Sans aldéhyde et sans phénol
- Action rapide

Composants

Solution d'imprégnation des lingettes, contenu pour 100 g de solution active :

- 45 g éthanol
- 15 g isopropanol
- 0,1 g digluconate de chlorhexidine
- 0,08 g trialkylethoxyammoniumpropionat
- 0,05 g dérivés d'alkylamine

Format : 210 x 260 mm

Spectre et temps d'action

Bactéricide	60 sec.
(y compris TBC et MRSA)	
Fongicide	60 sec.
(EN 1275 y compris candidas albicans)	
Virucide HBV/HIV	60 sec.
(actif contre les virus enveloppés selon RKI, par ex. HBV, HIV)	
BVDV (virus modèle de l'hépatite C), Influenza (H5N1, H1N1)	30 sec.
HSV, Vaccinia (variole)	30 sec.
Adeno	2 min.

Domaine d'utilisation :

MinutenWipes Jumbo s'utilise pour la désinfection et le nettoyage rapides des surfaces, des objets, tablettes, manettes d'units, appareils, touches de commande, meubles, accoudoirs, poignées de porte, etc.

N'utiliser que sur des surfaces résistantes à l'alcool ! (éviter cuir, bois verni et peinture)

Propriétés spécifiques :

- Durée de conservation 2 ans
- **Biodégradable** conformément aux Directives de l'OCDE
- Compatibilité avec les matériaux utilisés au cabinet dentaire
- Agréé par Sirona Dental

Conditionnement :

AP 3046
Boîte Jumbo de 200 lingettes
AP 3040
carton de 12 recharges

Certification :

Certificat
CE N° G1 06 03 29056 060

Produits de désinfection pour les surfaces des dispositifs médicaux non critiques.



AP3046

AP3040

Expertises

1. DR. H. BRILL, HAMBURG :
MRSA, 2009-07; EN 14561 + EN 14562, 2009-06; Langzeit/Remanenz inkl. EN 13697, 2008-01
2. PROF. DR. P. HEEG, TÜBINGEN :
DGHM, 1999-03
3. DR. J. HÖFFLER, HAMBURG :
EN 1040, 2009-05; EN 1275 + EN 1276, 2009-04
4. PROF. DDR. E. MARTH, GRAZ :
DGHM, 2002-07
5. PROF. DR. R. SCHUBERT, FRANKFURT/M. :
VAH inkl. EN 13624 + EN 13727, 2006-05
6. PROF. DR. H.-P. WERNER, SCHWERIN :
VAH, 2009-09; Viruzidie (DVV, Carriertest 2012), 2013-09
7. DR. J. STEINMANN, BREMEN :
Adeno, 2006-05; Vaccinia, 2006-05; BVDV, 2003-11 Virusinaktivierend: behüllte Viren inkl. HBV, HCV, HIV, Influenza (inkl. H1N1 + H5N1), Herpes simplex, 2009-08; Corona Virus inkl. Mers-CoV, 2014-05