




Polierer | Set 4312A

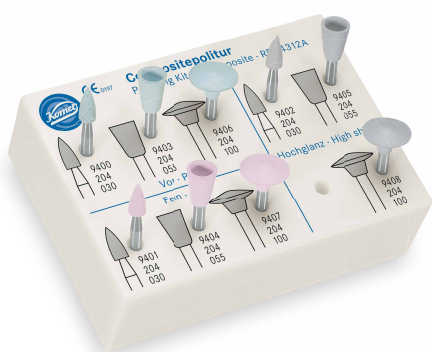

zur Compositepolitur.

Das Set ist für die Politur von Composite-Restaurationen und Verblendkunststoffen geeignet. Die dreistufige Politur mit grobem (blau), mittlerem (rosa) und feinem (grau) Diamantkorn sorgt für eine glänzende Composite-Oberfläche.

Anwendungshinweise:

- Optimale Drehzahl bei $\text{opt. } 5.000 - 6.000 \text{ min}^{-1}$
- mit ausreichend Kühlung arbeiten (mind. 50 ml/min)
- mit möglichst geringer Anpresskraft und leicht kreisenden Bewegungen arbeiten
- ohne zusätzliche Polierpaste einsetzen
- für Polierer geeignete, alkoholfreie Reinigungs- und Desinfektionsmittel verwenden z. B. Komet® DC1® (manuelle Aufbereitung) bzw. DCTherm® (maschinelle Aufbereitung)
- nur im Autoklav sterilisieren

Die Politur erfolgt in drei Schritten:

1. Die **hellblauen** Polierer erzielen auf Composite-Füllungen eine schnelle und effektive Vorpolitur.



9400.204.030



9403.204.055



9406.204.100

2. Die **hellrosa** farbigen Polierer erzielen einen seidenmatten Glanz.



9401.204.030




9404.204.055



9407.204.100


3. Die **hellgrauen**, feinen Polierer führen zum Hochglanz.

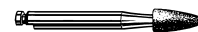

9402.204.030



9405.204.055

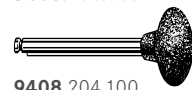

9408.204.100

