




Полиры | Набор 4312А

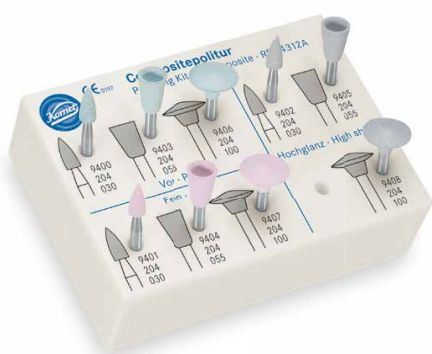

Для полирования композита.

Этот набор разработан для полирования композитных реставраций и акриловых виниров. Трехэтапная полировочная система, включающая в себя грубый (голубой), средний (розовый) и мелкий (серый) по абразивности инструменты, гарантирует непревзойденную высокоглянцевую финишную обработку поверхности композита.

Рекомендации по применению:

- Рекомендуемая скорость:
⦿ опт. 5.000 – 6.000 об/мин
- Обеспечьте достаточное охлаждение (минимум 50 мл/мин.)
- Прилагайте низкое контактное давление и работайте круговыми движениями
- Обрабатывайте поверхность без полировочной пасты
- Используйте очищающие и дезинфицирующие средства, не содержащие алкоголь и предназначенные для полиров, например, КOMET DC1 (ручная обработка) или DCTherm (механическая обработка)
- Подходят только для стерилизации в автоклаве

Полирование выполняется в три последовательных этапа:

1. Светло-голубые полиры созданы для быстрого и эффективного предварительного полирования композитных пломб.



9400.204.030



9403.204.055



9406.204.100

2. Светло-розовые полиры служат для глянцевой финишной обработки.



9401.204.030




9404.204.055



9407.204.100

3. Высокоглянцевый эффект достигается при помощи мелкоабразивных светло-серых полиров.

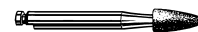

9402.204.030



9405.204.055



9408.204.100

