

# SonicLine Quick

Scaler/Perio | SFQ1-8



== max. 2 mm



SFQ1

SFQ2

SFQ3

SFQ4

SFQ4L

SFQ4R

SFQ8

Indikation/Indication	SFQ2008L	Leistungsstufe Power Level		
Scaler		1	2	3
Implantatprophylaxe/Implant prophylaxis		1	2	●
Paro/Perio		1	2	3
Wurzelglättung/Root Planer		1	2	●
Kronenstumpfpräparation/Crown Prep		1	2	●
Kavitätenpräparation/Cavity Prep, Inlay		1	●	3
Micro/Bevel		1	●	●
Stripping/Shaping		1	●	●
Chirurgie* /Surgery*		1	2	●

\*SFSQ100/101/102 auch in Stufe 3 erlaubt.  
 \*SFSQ100/101/102 also permitted in level 3.

● erlaubt/permitted  
 ● nur kurzfristig erlaubt/permitted for a short time only  
 ● nicht erlaubt/not permitted