




# EasySeal




## Der Goldstandard unter den Sealern.

Nach einer erfolgreichen Wurzelkanalbehandlung ist es Aufgabe der Wurzelfüllung, den Kanal dicht zu verschließen, um eine Reinfektion zu verhindern. EasySeal ist ein Wurzelfüllmaterial auf Epoxidharzbasis und eignet sich hervorragend für orthograde Füllungstechniken.

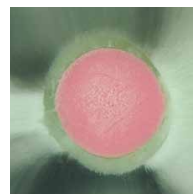

**EasySeal:** Die Füllung ist dicht, Bakterien können nicht eintreten. Der Farbstoff konnte nicht zwischen Guttapercha und Kanalwand eindringen.

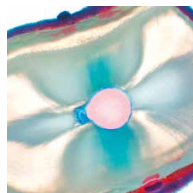

**Marktüblicher Sealer:** Farbstoff konnte bis zur Guttapercha vordringen. Die Füllung ist nicht dicht. Kein Schutz vor erneutem Bakterieneintritt.



### Dauerhafter Verschluss:

EasySeal ist ein Wurzelfüllmaterial auf Epoxidharzbasis. Durch die Zusammensetzung des Materials wird eine sehr gute Haftung am Dentin erzielt. Geringe Löslichkeit und hohe Temperaturstabilität sorgen zudem dafür, dass der Verschluss auf Dauer garantiert werden kann. Durch die Verwendung von EasySeal wird der Wurzelkanal vor erneutem Bakterieneintritt dauerhaft geschützt.



### Reduziertes Risiko für Reinfektionen:

EasySeal weist eine außergewöhnliche Fließfähigkeit auf. So lassen sich mit EasySeal sogar kleinste Dentintubuli füllen. Reinfektionen werden vermieden.



### Schnelle und komfortable Anwendung:

EasySeal befindet sich in einer Doppelkammerspitze, die ein schnelles und einfaches Handling ohne Anmischen ermöglicht. Zudem ermöglicht die kurze Abbindezeit von 15 Minuten eine schnelle Weiterbehandlung.

## Anwendung:

1. Den Wurzelkanal gründlich reinigen und trocknen, z. B. mit Papierspitzen und ölfreiem Luftstrom für ca. 10 Sek.

2. Vor Gebrauch von EasySeal die Verschlusskappe von der Doppelkammerspritze durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn entfernen. Füllhöhe der beiden Komponenten in der Doppelkammerspritze prüfen (siehe Abb. A-C). Mischkanüle (und Endo-Tip) aufsetzen und im Uhrzeigersinn festdrehen. Durch gleichmäßiges Drücken des Kolbens beide Pasten in die Mischkanüle pressen.



3. EasySeal auf einen Anmischblock ausdrücken, mit einem Lentulo aufnehmen und unter Rotation in den Kanal bringen.

Oder passenden Masterpoint auswählen, apikal kürzen, EasySeal aufbringen und in den Kanal einbringen. Die angemischte Wurzelfüllpaste kann ca. 15 Minuten verarbeitet werden.

4. Anschließend Wurzelkanal abfüllen, z. B. kondensierend oder thermoplastisch. Eine vollständige Aushärtung erfolgt bei 37°C Körpertemperatur innerhalb von 24 Stunden.

5. Nach Gebrauch Mischkanüle abziehen und EasySeal mit der Verschlusskappe verschließen.



**9978.000**  
EasySeal 9 g Minimix-Spritze



**9979.000**  
EasySeal Mixing Tips (20 Stück)



**9980.000**  
EasySeal Endo Tips (20 Stück)