



# El tratamiento endodóntico. Paso a paso.

---





**1** Cavidad de acceso



**2** Ensanchamiento coronal



**3** Creación de una vía de deslizamiento

### EndoGuard

Es capaz de remover la dentina excesiva, protegiendo el fondo de la cámara pulpar gracias a su punta lisa inactiva.

⚙️<sub>opt.</sub> 20.000 rpm  
 ⚙️<sub>max.</sub> 160.000 rpm

H2690GK.314.01.6



### Opener

Utilizado en el tercio coronal del conducto, el Opener es capaz de remover una gran parte de las bacterias desde el principio del tratamiento.

⚙️<sub>opt.</sub> 300 rpm  
 ⚙️<sub>max.</sub> 500 rpm  
 Torque: 2,8 Ncm

OP08L19.204.025  
OP10L19.204.030



### Limas de sondaje

Acero templado para facilitar el sondaje manual del conducto.

1.7525.654.015



### EndoTracer

Fresa redonda pequeña con un cuello largo y estrecho para asegurar una buena visibilidad de la cavidad de acceso.

Es ideal para la preparación del istmo.

⚙️<sub>opt.</sub> 1.500 rpm  
 ⚙️<sub>max.</sub> 20.000 rpm

H1SML34.205.010



### EndoExplorer

La fina parte activa del instrumento de forma cónica permite guiar el instrumento de forma controlada, facilitando una preparación mínimamente invasiva de la cavidad de acceso.

Es ideal para los usuarios de un microscopio.

⚙️<sub>opt.</sub> 2.000 rpm  
 ⚙️<sub>max.</sub> 40.000 rpm

EX2.204.011



### PathGlider

Reduce el riesgo de un desplazamiento del conducto y la creación de escalas indeseadas. Allana el camino a las limas a ser utilizadas a continuación.

⚙️<sub>opt.</sub> 300 rpm  
 ⚙️<sub>max.</sub> 500 rpm  
 Torque: 0,5 Ncm

PG0.3LZ5.204.015



# Endodoncia por Komet.

Simplicidad, Seguridad y Calidad.

Gama completa. Servicio personalizado.



## 4 Preparación con limas rotatorias



### F360

Fácil y Seguro.

Sistema de dos limas rotatorias con conicidad .04

Opt. 250-350 rpm  
Max. 500 rpm  
Torque: 1,8 Ncm

STERILE | R



F04L25.204.025 + 035

### F6 SkyTaper

Flexibilidad sin compromisos.

Preparación del conducto en modo rotativo con una lima con conicidad .06

Opt. 300 rpm  
Max. 500 rpm  
020 - 030  
Torque: 2,2 Ncm  
035 - 040  
Torque: 2,8 Ncm

STERILE | R



F06L25.204.025

### R6 ReziFlow

Tratamiento recíproco con delicadeza inédita.

Preparación del conducto en modo recíproco con una lima con conicidad constante.

STERILE | R



R04L25.204.025



5 Irrigación y activación



6 Obturación



7 Tratamiento postendodóntico

**Punta de irrigación**

Activa el líquido endodóntico de irrigación mediante vibración sónica, y aumenta su efectividad.



SF45.000.020

**EasySeal**

Sealer a base de resina epoxi.

Gracias a su perfecta adhesión a la dentina garantiza un sellado perfecto del conducto e impide la reinfección.



9978


**Puntas de papel,  
puntas de gutapercha**

Varias gamas, adaptadas a los sistemas de limas rotatorias F360, F6 SkyTaper y R6 ReziFlow.



**DentinPost X Coated  
TitanPost X Coated**

Pernos cortos de composite reforzado por fibras de vidrio y titanio puro para minimizar la debilitación de la raíz.

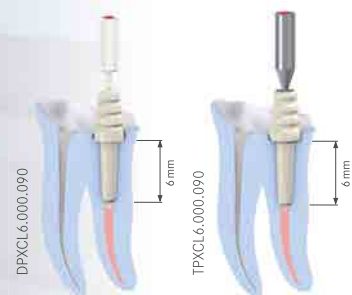

DPXCL6.000.090

TPXCL6.000.090

6 mm

6 mm

# Componentes del sistema



Cavidad de acceso

## EndoGuard



- H269QGK.314.012
- H269QGK.314.016
- H269QGK.315.016

## EndoExplorer



- EX1S.204.007
- EX1.204.007
- EX1L.204.007
- EX1.310.007



- EX2S.204.011
- EX2.204.011
- EX2L.204.011
- EX2.310.011



- EX3S.204.013
- EX3.204.013
- EX3L.204.013
- EX3.310.013

Set 4664

## EndoTracer



- H1SML31.205.004
- H1SML31.205.006
- H1SML31.205.008
- H1SML31.205.010
- H1SML31.205.012
- H1SML31.205.014



- H1SML34.205.004
- H1SML34.205.006
- H1SML34.205.008
- H1SML34.205.010
- H1SML34.205.012
- H1SML34.205.014

Set 4670



Ensanchamiento coronal

## Opener



- OP10L19.204.030
- OP10L15.204.030
- OP08L19.204.025



Creación de una vía de deslizamiento

## PathGlider



- PG03L21.204.015
- PG03L21.204.020
- PG03L25.204.015
- PG03L25.204.020
- PG03L31.204.015
- PG03L31.204.020

## Limas de sondaje



- 17521.654.006
- 17521.654.008
- 17521.654.010
- 17521.654.012
- 17521.654.015

Assortment

17521.654.S1

- 17525.654.006
- 17525.654.008
- 17525.654.010
- 17525.654.012
- 17525.654.015

Assortment

17525.654.S1



Preparación con limas rotatorias

## F360



- F04L21.204.025
- F04L21.204.035
- F04L21.204.045
- F04L21.204.055



- F04L25.204.025
- F04L25.204.035
- F04L25.204.045
- F04L25.204.055



- F04L31.204.025
- F04L31.204.035
- F04L31.204.045
- F04L31.204.055



Preparación con limas rotatorias

## F6 SkyTaper



- F06L21.204.020
- F06L21.204.025
- F06L21.204.030
- F06L21.204.035
- F06L21.204.040



- F06L25.204.020
- F06L25.204.025
- F06L25.204.030
- F06L25.204.035
- F06L25.204.040



- F06L31.204.020
- F06L31.204.025
- F06L31.204.030
- F06L31.204.035
- F06L31.204.040



Preparación con limas rotatorias

## R6 ReziFlow



- R06L21.204.025
- R06L21.204.030
- R06L21.204.035
- R06L21.204.040
- R06L21.204.045
- R06L21.204.050



- R06L25.204.025
- R06L25.204.030
- R06L25.204.035
- R06L25.204.040
- R06L25.204.045
- R06L25.204.050



- R06L31.204.025
- R06L31.204.030
- R06L31.204.035
- R06L31.204.040
- R06L31.204.045
- R06L31.204.050



Irrigación y activación

## Punta sónica para activar soluciones de irrigación

SF65.000.020

## Soporte para puntas

SF1981.000.

## Tuerca de fijación para soporte para puntas

587.000.

Set 4615



Obturación

## EasySeal

9978

## F360 puntas de gutapercha

GPF04.000.

## F360 Puntas de papel

PPF04.000.

## F6 SkyTaper Puntas de gutapercha

GPF06.000.

## F6 SkyTaper Puntas de papel

PPF06.000.

## R6 ReziFlow Puntas de gutapercha

GPR06.000.

## R6 ReziFlow Puntas de papel

PPR06.000.



Tratamiento postendodóntico

## DentinPost X Coated

● Set 4650 (Gr. 070)

● Set 4651 (Gr. 090)

● Set 4661 (Gr. 110)

## TitanPost X Coated

● Set 4657 (Gr. 070)

● Set 4658 (Gr. 090)

Komet Dental

Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG

Trophagener Weg 25 · 32657 Lemgo

Postfach 160 · 32631 Lemgo · Germany

Verkauf Deutschland:

Telefon +49 (0) 5261 701-700

Telefax +49 (0) 5261 701-289

info@kometdental.de

www.kometdental.de

Komet Austria Handelsagentur GmbH

Hellbrunner Straße 15

5020 Salzburg · Austria

Telefon +43 (0) 662 829-434

Telefax +43 (0) 662 829-435

info@kometdental.at

www.kometdental.at

Export:

Telefon +49 (0) 5261 701-0

Telefax +49 (0) 5261 701-329

export@kometdental.de

www.kometdental.de

Brasseler®, Komet®, CeraBur®, CeraCut®, CeraDrill®, CeraFusion®, CeraPost®, CompoClip®, CompoStrip®, DC1®, DCTherm®, FastFile®, F360®, F6 SkyTaper®, H4MC®, MicroPlant®, OptiPost®, PolyBur®, TissueMaster®, TMC® y TissueMaster Concept® son marcas registradas de Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG.

Los productos y las denominaciones comerciales que figuran en estas páginas se encuentran protegidos en parte por patente o por derecho de autor o de marcas. La ausencia de una nota específica o la no figuración del signo ® no significa que no exista tal protección jurídica.

Esta obra está protegida por derecho de autor. Todos los derechos de divulgación, incluyendo reproducción total o parcial de fotos o textos, reimpresiones o extractos, almacenamiento o recuperación o difusión mediante cualquier sistema, están reservados y requieren de nuestro consentimiento por escrito.

Los colores y los productos están sujetos a alteraciones, exceptuando errores de impresión.

Hecho en febrero de 2017